

Link do produktu: <https://www.e-soczewki24.pl/eyeye-b5-active-200ml-plyn-wielofunkcyjny-do-twardych-soczewek-p-15.html>



## EYEEYE B5 Active 200ml płyn wielofunkcyjny do twardych soczewek

Cena	<b>34,89 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>BARNAUX</b>

### Opis produktu

#### EYEEYE B5 Active 200ml

Wielofunkcyjny płyn firmy **Barnaux** z prowitaminą B5 do czyszczenia i pielęgnacji **twardych** soczewek kontaktowych.

**Skład:** Polyhexanide 0.0001%, Poloxamine 0.5%, NaCl, Dexpanthenol 1%, HydraFlex-RGP 0.5%.

**Zawartość opakowania:** butelka płynu 200ml , pojemnik na soczewki kontaktowe.

**Data ważności :** min. 2026-04  
Zawartość butelki należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od jej otwarcia.

**Zastosowanie:** do wszystkich typów soczewek gazo-przepuszczalnych oraz twardych soczewek kontaktowych.

**EYEEYE B5 Active** jest preparatem gwarantującym pełną ochronę soczewek i oka:

- czyści, płucze i dezynfekuje soczewki,
- usuwa osady białka ,
- nawilża i pielęgnuje oko, utrzymując odpowiednią wilgotność soczewek,
- ułatwia zakładanie soczewek i ich przechowywanie,
- chroni i wspomaga odbudowę uszkodzonych komórek nabłonkowych rogówki, jednocześnie ją odżywiając

Produkt jest wyrobem medycznym i posiada:

- znak CE 0344 (4-cyfrowy numer jednostki notyfikowanej)
- oznakowanie i etykietę w języku polskim
- instrukcję w języku polskim
- informację o deklaracji zgodności UE

### Porady

EYEEYE B5 Active

Płyn wielofunkcyjny do pielęgnacji twardych soczewek kontaktowych

---

Czynniki niezbędne do właściwej codziennej obsługi Twoich twardych soczewek z użyciem roztworu EYEYE B5 Active:

**1. Higiena:** Zanim zdejmiesz soczewki kontaktowe lub wyjmiesz je z pojemnika, starannie umyj ręce, po czym osusz je czystym ręcznikiem.


**2. Czyszczenie:** W przypadku wystąpienia dużych osadów umieść soczewkę na dłoni. Umieść kilka kropli płynu EYEYE B5 Active na soczewce. Następnie delikatnie ją pocieraj palcem.

**3. Płukanie:** Opłucz starannie soczewki twarde roztworem EYEYE B5 Active, po czym umieść je w pojemniku na soczewki.

**4. Dezynfekcja i przechowywanie:** Wypełnij pojemnik roztworem EYEYE B5 Active. Pozostaw soczewki w pojemniku na trwający co najmniej cztery godziny cykl ich dezynfekcji.

**5. Zakładanie:** Wyjmij soczewki twarde z pojemnika, opłucz je roztworem EYEYE B5 Active, po czym załóż je. Opłucz pojemnik na soczewki roztworem EYEYE B5 Active lub EYEYE Saline. Pozostaw pojemnik do wyschnięcia (nie susz go ręcznikiem).

**6. Nawilżanie:** Jeśli odczuwasz niewielkie podrażnienia podczas noszenia twardych soczewek kontaktowych, zpuść do oczu kroplę EYEYE B5 Active, następnie kilkakrotnie zamrugaj. Nie musisz przy tym zdejmować soczewek. Jeśli podrażnienia nie ustąpią, skonsultuj się z lekarzem okulistą lub optometrystą.

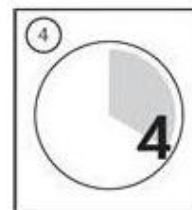

## EYEYE B5 Active - Wskazania użytkowe:

- Należy zużyć zawartość butelki EYEYE B5 Active w ciągu 2 miesięcy od jej otwarcia.
- Nie używać EYEYE B5 Active po upływie terminu przydatności.
- Przechowywać butelkę w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C.

- 
- Należy zamykać butelkę EYEYE B5 Active bezpośrednio po użyciu.
  - W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki.
  - Trzymać butelkę EYEYE B5 Active poza zasięgiem dzieci.
  - Jeśli zalecono Ci lek do oczu, przed jego użyciem w połączeniu z soczewkami oraz preparatem EYEYE B5 Active skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

## Płyn EYEYE B5 Active

**Właściwe użycie płynu EYEYE B5 Active jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek.**

Płyn EYEYE B5 Active to pierwszy preparat gwarantujący pełną ochronę soczewek oraz oczu, który można stosować do wszystkich typów soczewek kontaktowych gazoprzepuszczalnych oraz soczewek twardych.

Preparat służy do płukania, dezynfekcji, przechowywania, zakładania i nawilżania soczewek kontaktowych. Płyn EYEYE B5 Active pielęgnuje oczy, czyści oraz usuwa osady białkowe. To wszystko w jednym produkcie!

Ze względu na unikalny skład zawierający prowitaminę B5 płyn EYEYE B5 Active, chroni oraz wspomaga samoregeneracyjne właściwości rogówki oraz utrzymuje wilgotność podczas noszenia soczewek. Unikalny system HydraFlex-RGP zapewnia większy komfort użytkowania soczewek, zapewniając Twoim oczom głęboko kojące odczucie.

---

## Wskazówki pielęgnacji twardych soczewek kontaktowych i pojemnika na soczewki:

- Zaleca się używanie nowego pojemnika po zużyciu całej butelki płynu EYEYE B5 Active, aby był on czysty, a także wolny od bakterii.
- Zawsze natychmiast usuwaj zużyty roztwór. Następnie opłucz pojemnik na soczewki twarde płynem EYEYE B5 Active, aby go zdezynfekować, następnie pozwól mu wyschnąć na powietrzu. NIE osuszaj pojemnika ściereczką.
- Unikaj używania wody z kranu do płukania soczewek twardych oraz pojemnika.
- Jeśli soczewki twarde pozostają w roztworze EYEYE B5 Active dłużej niż kilka dni zaleca się ponowne ich zdezynfekowanie.

## Skutki uboczne:

Nie używaj EYEYE B5 Active przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu.