

Link do produktu: <https://www.e-soczewki24.pl/eyeye-basic-360ml-plyn-do-pielęgnacji-soczewek-p-12.html>



## EYEEYE Basic 360ml płyn do pielęgnacji soczewek

Cena	<b>19,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>BARNAUX</b>

### Opis produktu

#### EYEEYE Basic 360ml

Płyn firmy **Barnaux** do czyszczenia i pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych.

**Skład:** Polyhexanide 0,0002 %, EDTA 0,01 %.

**Opakowanie:** 360ml

**Data ważności :** min. 2027-01

#### EYEEYE Basic

- tradycyjny sprawdzony zestaw składników aktywnych
- skutecznie czyści i usuwa osady białkowe
- do wszystkich typów miękkich soczewek kontaktowych
- tylko cztery godziny czyszczenia soczewek
- najlepszy stosunek jakości do ceny

Produkt jest wyrobem medycznym i posiada:

- znak CE 0344 (4-cyfrowy numer jednostki notyfikowanej)
- oznakowanie i etykietę w języku polskim
- instrukcję w języku polskim
- informację o deklaracji zgodności UE

### Porady

EYEEYE Basic

**Właściwe użycie EYEEYE Basic jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek.**

- Płyn do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych **EYEYE BASIC**.
- Służy do dezynfekcji, przechowywania oraz płukania soczewek kontaktowych, ułatwia ich aplikację.
- Czyści i usuwa osady białkowe.




EYEYE Basic - Sprawdzony, ekonomiczny preparat do pielęgnacji soczewek kontaktowych

## Czynniki niezbędne do właściwej, codziennej pielęgnacji Twoich soczewek z wykorzystaniem płynu EYEYE Basic:

- 1. Higiena:** Przed zdejmowaniem soczewek lub wyjmowaniem ich z pojemnika należy starannie umyć ręce. Osusz ręce czystym ręcznikiem. Możesz zastosować specjalny preparat dezynfekujący dłonie **EYEYE Sanilon**.
- 2. Czyszczenie:** W przypadku wystąpienia dużych osadów białka i zanieczyszczeń umieść soczewki na dłoni. Następnie wpuść kilka kropli **EYEYE Basic** na soczewki kontaktowe. Delikatnie pocieraj je palcem.
- 3. Płukanie:** Przed dezynfekcją opłucz starannie soczewki kontaktowe płynem **EYEYE BASIC**, po czym umieść je w pojemniku na soczewki.
- 4. Dezynfekcja i przechowywanie:** Wypełnij pojemnik płynem **EYEYE BASIC**. Pozostaw soczewki kontaktowe w pojemniku na co najmniej 4 godziny.
- 5. Zakładanie:** Wyjmij soczewki kontaktowe z pojemnika po zakończeniu cyklu ich dezynfekcji, opłucz je roztworem **EYEYE**

**BASIC** i załóż soczewki do oczu. Oplucz pojemnik na soczewki płynem lub solą fizjologiczną **EYEYE Saline**, pozostaw pojemnik do wyschnięcia na powietrzu.

**6. Nawilżanie:** Jeśli będziesz odczuwać niewielkie podrażnienia podczas noszenia soczewek kontaktowych, zpuść do oka kroplę **EYEYE BASIC** i kilkakrotnie zamrugaj. Możesz przy tym pozostawić soczewkę w oku. Jeśli podrażnienia nie ustąpią, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

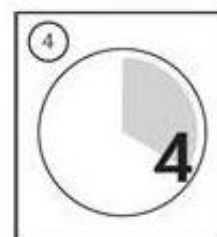

## EYEYE BASIC – Zalecenia:

- Należy zużyć zawartość **EYEYE BASIC** w ciągu 2 miesięcy od jej otwarcia.
- Nie używać **EYEYE BASIC** po upływie terminu przydatności.
- Przechowywać **EYEYE BASIC** w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C.
- Należy zamykać butelkę **EYEYE BASIC** bezpośrednio po użyciu.
- W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli zalecono Ci lek do oczu, przed użyciem leku w połączeniu z soczewkami kontaktowymi oraz **EYEYE BASIC**, skonsultuj się z okulistą

---

lub optometrystą.

### Wskazówki przydatne odnośnie właściwego użycia soczewek oraz pojemnika na soczewki:

- Zaleca się używanie nowego pojemnika na soczewki kontaktowe po 3 miesiącach, aby był on czysty i wolny od bakterii.
- Zawsze natychmiast usuwaj zużyty roztwór. Następnie opłucz pojemnik roztworem **EYEYE BASIC**, aby go zdezynfekować. Pozwól mu wyschnąć na powietrzu. **NIE** osuszaj pojemnika ściereczką.
- Unikaj używania wody z kranu do soczewek i do pojemnika. Niektóre typy soczewek mogą ulec deformacji w kontakcie z wodą.
- Jeśli soczewki pozostają w roztworze płynu **EYEYE BASIC** dłużej niż kilka dni, zaleca się ponowne zdezynfekowanie soczewek.

### Skutki uboczne

Nie używać **EYEYE BASIC** przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu!