

Link do produktu: <https://www.e-soczewki24.pl/eyeye-bioxy-12szt-soczewki-miesieczne-p-69.html>

EYEEYE Bioxy 12szt soczewki miesięczne

Cena	132,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Clearlab SG Pte Ltd

Opis produktu

EYEEYE Bioxy 12szt

Miesięczne soczewki kontaktowe do dziennego noszenia

Soczewki wyprodukowano z materiału BioxyGMA, który ma takie same właściwości, jak naturalny system nawilżający filmu łzowego.

Rogówka chroniona jest przez warstwę mucynową, umożliwiającą filmowi łzowemu utrzymanie się na wodoodpornej rogówce. Warstwa mucynowa wyrównuje ewentualne nieregularności, chroni powierzchnię rogówki przed wysuszeniem i usuwa zanieczyszczenia.

Oligosacharydy, które są istotną oznaką obecności glikoprotein, występujących w znacznych ilościach w mucynie, wiążą wodę.

Cecha ta została odwzorowana w materiale soczewkowym, dzięki czemu soczewki utrzymują wilgoć przez długi czas.

Materiał hipoałergiczny z biokomponentami – naturalny komfort.

Materiał niejonowany – mniej osadów, zabrudzeń, wygoda noszenia.

Asferyczny kształt – brak zniekształceń obrazu.

Zaokrąglone i odwiedzone krawędzie – brak podrażnień oka.

Wysoka transmisja tlenu.

Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego.

PARAMETRY Uwodnienie:	57%	Zakres mocy:	od – 0.25 do – 6.00 (co 0.25 D)
Materiał:	BioxyGMA-hioxifilcon		od – 6.50 do –12.00 (co 0.50 D)
Grubość:	0,09mm (-3.00 D)		od + 0.25 do + 4.00 (co 0.25 D)
BC:	8.6 (asferyczna)		od + 4.50 do + 6.00 (co 0.50 D)
Dia:	14.2	Opakowanie:	12szt tej samej mocy
Dk/t:	35	Data ważności:	min. 12 m-cy od daty zakupu.

Produkt jest wyrobem medycznym i posiada:

- znak CE 2460 (4-cyfrowy numer jednostki notyfikowanej)
- oznakowanie i etykietę w języku polskim
- instrukcję w języku polskim
- informację o deklaracji zgodności UE

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc soczewek:: -0.25 D , -0.50 D , -0.75 D , -1.00 D , -1.25 D , -1.50 D , -1.75 D , -2.00 D , -2.25 D , -2.50 D , -2.75 D , -3.00 D , -3.25 D , -3.50 D , -3.75 D , -4.00 D , -4.25 D , -4.50 D , -4.75 D , -5.00 D , -5.25 D , -5.50 D , -5.75 D , -6.00 D , -6.50 D , -7.00 D , -7.50 D , -8.00 D , -8.50 D , -9.00 D , -9.50 D , -10.00 D , -10.50 D , -11.00 D , -11.50 D , -12.00 D , +0.25 D , +0.50 D , +0.75 D , +1.00 D , +1.25 D , +1.50 D , +1.75 D , +2.00 D , +2.25 D , +2.50 D , +2.75 D , +3.00 D , +3.25 D , +3.50 D , +3.75 D , +4.00 D , +4.50 D , +5.00 D , +5.50 D , +6.00 D

Zakładanie soczewek

Porady / Soczewki miesięczne BIOXY

Miesięczne soczewki kontaktowe EYEYE BIOXY

W celu założenia soczewek miesięcznych wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je. Zamiast wody i mydła, możesz użyć antybakteryjnego żelu EYEYE Sanilon.
- Zerwij folię z opakowania i delikatnie wyjmij soczewkę BIOXY. Przed kolejnym założeniem soczewki spłucz ją płynem lub solą fizjologiczną w celu usunięcia osadów.
- Umieść soczewkę BIOXY na opuszku palca wskazującego i upewnij się, czy soczewka nie wywinęła się na drugą stronę i czy nie jest uszkodzona.
- Środkowym palcem ręki trzymającej soczewkę odciągnij dolną powiekę, a środkowym lub wskazującym palcem drugiej ręki przytrzymaj górną powiekę.
- Delikatnie umieść soczewkę BIOXY na oku i powoli puść powieki. Mrugnij kilka razy.
- Powtórz te czynności, zakładając drugą soczewkę.

W celu zdjęcia soczewek miesięcznych wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je. Zamiast wody i mydła, możesz użyć

antybakteryjnego żelu EYEYE Sanilon.

- Jeśli odczuwasz suchość oczu, użyj kropeł EYEYE Hydraclair przed ściągnięciem soczewek BIOXY.
- Przytrzymaj dolną powiekę, spójrz w górę a palcem wskazującym drugiej ręki zsuń soczewkę.
- Ostrożnie chwyć (uszczypnij) soczewkę BIOXY przy pomocy kciuka oraz palca wskazującego, a następnie ją wyjmij.
- W taki sam sposób postępuj z drugą soczewką BIOXY.
- Soczewki miesięczne BIOXY umieść w pojemniku. Prawą do części oznaczonej literą „R”, a lewą do części nieoznaczonej lub oznaczonej literą „L”. Soczewki zalej płynem do ich pielęgnacji, aby przeprowadzić proces ich czyszczenia.

Dodatkowe informacje

EYEYE BIOXY

Soczewki miesięczne

do dziennego noszenia

- Materiał hipoalergiczny z biokomponentami – naturalny komfort
- Materiał niejonowany – mniej osadów, zabrudzeń, długa wygoda noszenia
- Asferyczny kształt – brak zniekształceń obrazu
- Zaokrąglone i odwiedzone krawędzie – brak podrażnień oka

-
- Wysoka transmisja tlenu

SOCZEWKI EYEYE BIOXY - SPECYFIKACJA

Uwodnienie: 57%

Materiał: BioxyGMA-hioxifilcon

Grubość: 0.09 mm (-3.00 D)

BC: 8.6 (asferyczna)

Dia: 14.2

Dk/t: 35

Całkowity zakres mocy od -12.00 do +6.00 D:

od -0.25 do -6.00 (co 0.25 D),

od -6.50 do -12.00 (co 0.50 D),

od +0.25 do +4.00 (co 0.25 D),

od +4.50 do +6.00 (co 0.50 D).


EYEYE BIOXY – ASFERYCZNE, BOKOMPATYBILNE, MIESIĘCZNE SOCZEWKI KONTAKTOWE

Nowoczesny, aktywny styl życia wielu osób wymaga, aby noszone przez nich soczewki były coraz lepsze. Częste podróże, klimatyzacja w pomieszczeniach oraz długotrwałe korzystanie z komputerów powodują zmęczenie oczu, przejawia się uczuciem suchości, bólem czy też pogorszeniem widzenia.

Osoby noszące soczewki kontaktowe oczekują takich soczewek, które zwiększą komfort, polepszą widzenie oraz będą dostosowane do ich wymagającego

trybu życia. Wychodząc naprzeciw życzeniom zarówno osób noszących soczewki, jak i specjalistów, Barnaux Healthcare wprowadza na rynek nowe, miesięczne soczewki kontaktowe EYEYE BIOXY.

DOSKONAŁA BIOKOMPATYBILNOŚĆ

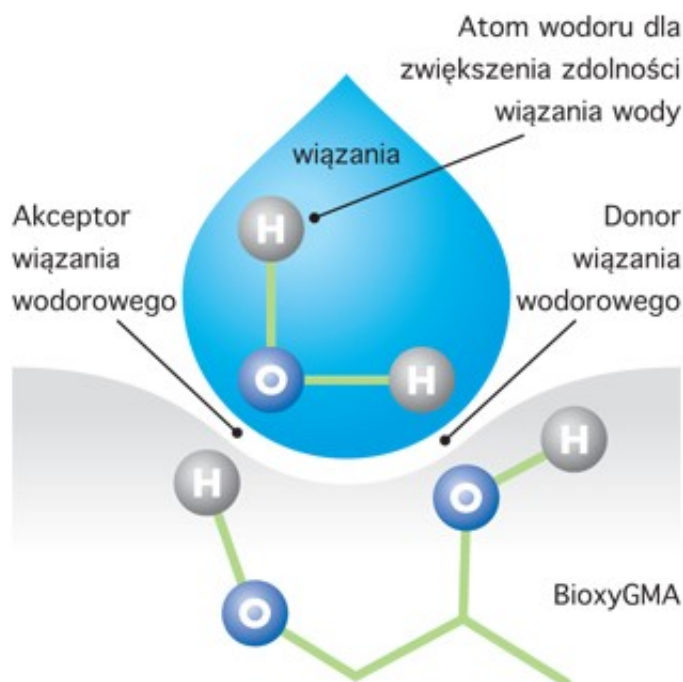

Biokompatybilny materiał soczewek EYEYE BIOXY

Soczewki EYEYE BIOXY wykonane zostały z bio-kompatybilnego materiału, którą osiągnięto poprzez eliminację reakcji alergicznych, nadwrażliwości lub innych działań ubocznych.

Stało się to możliwe dzięki odtworzeniu w materiale soczewkowym właściwości mucyny, produkowanej przez ciało ludzkie substancji nawilżającej.

Soczewki wyprodukowano z materiału BioxyGMA, który ma takie same właściwości, jak naturalny system nawilżający filmu łzowego. Rogówka chroniona jest przez warstwę mucynową, umożliwiającą filmowi łzowemu utrzymanie się na wodoodpornej rogówce.

Warstwa mucynowa wyrównuje ewentualne nieregularności, chroni powierzchnię rogówki przed wysuszeniem i usuwa zanieczyszczenia.

Oligosacharydy, które są istotną oznaką obecności glikoprotein, występujących w znacznych ilościach w mucynie, wiążą wodę. Cechę tą odwzorowano w materiale soczewkowym, dzięki czemu utrzymują one wilgoć przez długi czas.

Większy komfort noszenia


Strefa optyczna soczewki EYEE BIOXY stopniowo maleje, jej krawędź staje się cieńsza, dzięki czemu umożliwia ona dopływ tlenu, co zapewnia oczom większy komfort. Niejonowy charakter materiału, w połączeniu ze zmniejszonym wysuszaniem powoduje, że występuje o wiele mniej komplikacji spowodowanych noszeniem soczewek, takich jak podrażnienia, powstawanie plam, wysuszenie czy pogorszenie widzenia.

Lepsza zdolność widzenia dzięki asferycznemu kształtowi soczewki


Soczewki EYEE BIOXY są tak wykonane, że dzięki asferycznemu kształtowi korygowane są aberracje. Osoby noszące takie soczewki odczuwają to szczególnie podczas wieczornej jazdy samochodem. Kontrast ten jest o wiele lepszy, niż przy użyciu soczewek sferycznych.

Standardowa soczewka bez korekcji aberracji

Korekcja aberracji soczewką asferyczną Bioxy

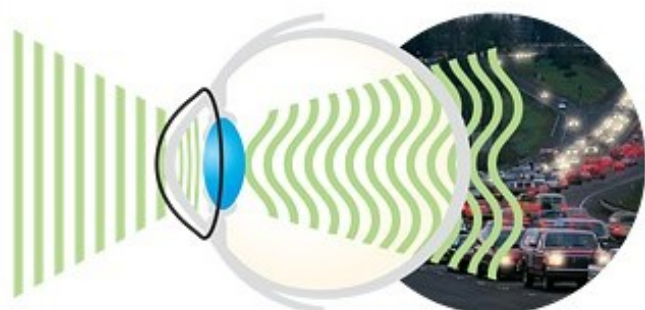

Padanie światła Nieskorygowany kąt padania światła Standardowy obraz

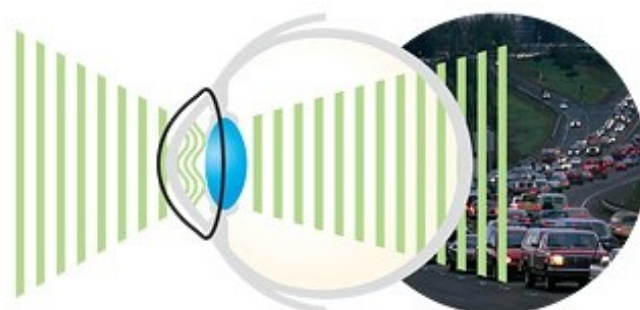


Padanie światła Skorygowany kąt padania światła Optymalizowany obraz

Osoby noszące soczewki EYEE BIOXY mogą odczuć takie korzyści jak:

- większy komfort
- dłuższy okres noszenia
- mniejsze dolegliwości oczu
- łatwość użytkowania
- zmniejszone osadzanie się białek
- brak reakcji alergicznych

Porównanie często używanych soczewek o tradycyjnych kształtach oraz soczewek EYEYE BIOXY

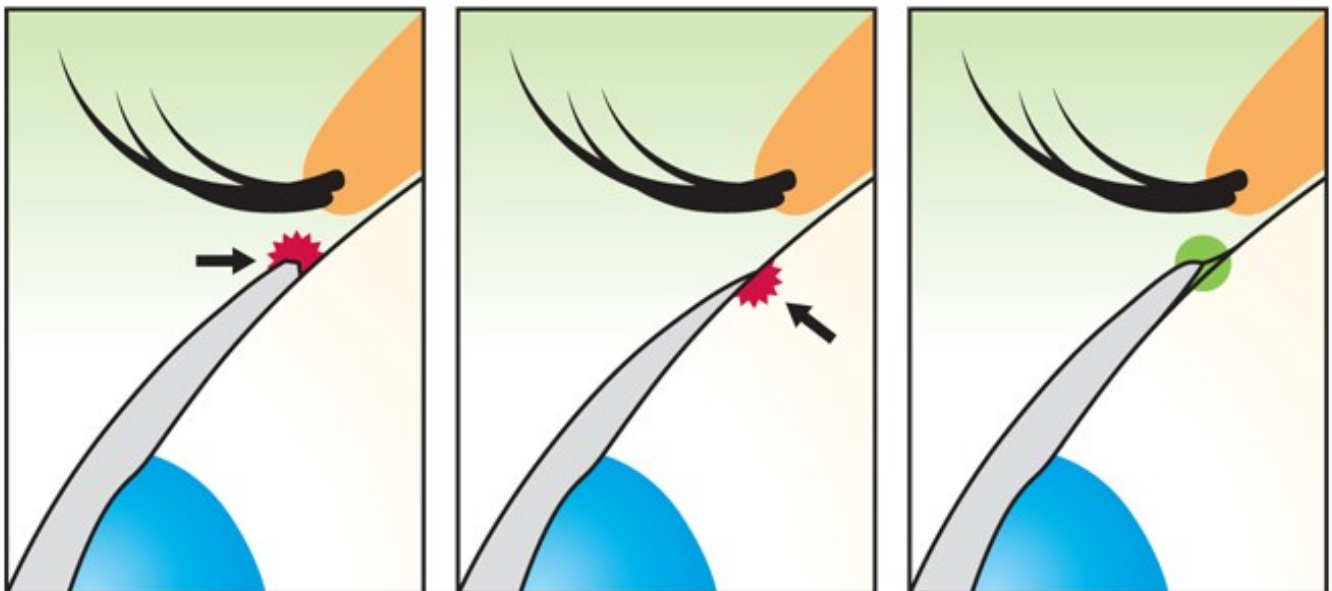

Soczewki kontaktowe EYEYE BIOXY mają specjalnie zaprojektowany okrągły profil krawędzi. W porównaniu z innymi często używanymi soczewkami o tradycyjnym kształcie, istnieje znacznie mniej punktów kontaktu z powierzchnią oczu. Krawędź soczewki zwęża się, dzięki czemu nie obciąża ona nabłonka rogówki. Zapewnia to oczom większy komfort podczas noszenia soczewek EYEYE BIOXY.