

Link do produktu: <https://www.e-soczewki24.pl/eyeye-bioxy-daily-30szt-soczewki-jednodniowe-p-4.html>

EYEEYE Bioxy Daily 30szt soczewki jednodniowe

Cena	67,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Clearlab SG Pte Ltd

Opis produktu

EYEEYE Bioxy Daily 30szt

Jednodniowe soczewki kontaktowe do dziennego noszenia

Soczewki wyprodukowano z materiału BioxyGMA, który ma takie same właściwości, jak naturalny system nawilżający filmu łzowego.

Rogówka chroniona jest przez warstwę mucynową, umożliwiającą filmowi łzowemu utrzymanie się na wodoodpornej rogówce.

Warstwa mucynowa wyrównuje ewentualne nieregularności, chroni powierzchnię rogówki przed wysuszeniem i usuwa zanieczyszczenia.

Oligosacharydy, które są istotną oznaką obecności glikoprotein występujących w znacznych ilościach w mucynie, wiążą wodę.

Cecha ta została odwzorowana w materiale soczewkowym, dzięki czemu soczewki utrzymują wilgoć przez długi czas.

Materiał hipoalergiczny z biokomponentami – naturalny komfort.

Materiał niejonowany – mniej osadów, zabrudzeń, wygoda noszenia.

Asferyczny kształt – brak zniekształceń obrazu.

Zaokrąglone i odwiedzione krawędzie – brak podrażnień oka.

Wysoka transmisja tlenu.

PARAMETRY

Zakres mocy:

od – 0.50 do – 6.00 (co 0.25 D)

od – 6.50 do – 8.00 (co 0.50 D)

od + 0.50 do + 4.00 (co 0.25 D)

Materiał: 42% BioxyGMA-hioxifilcon A, 58% woda w ochronnej soli fizjologicznej

Grubość: 0,09mm (-3.00 D)

BC: 8.7 (-10.00 - +3,75), 8.8(+4.00 - +6.00)

Dia: 14.2

Opakowanie: 30szt tej samej mocy

Produkt jest wyrobem medycznym i posiada:

- znak CE 2460 (4-cyfrowy numer jednostki notyfikowanej)
 - oznakowanie i etykietę w języku polskim
 - informację o deklaracji zgodności UE

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc soczewek:: -0.50 D , -0.75 D , -1.00 D , -1.25 D , -1.50 D , -1.75 D , -2.00 D , -2.25 D , -2.50 D , -2.75 D , -3.00 D , -3.25 D , -3.50 D , -3.75 D , -4.00 D , -4.25 D , -4.50 D , -4.75 D , -5.00 D , -5.25 D , -5.50 D , -5.75 D , -6.00 D , -6.50 D , -7.00 D , -7.50 D , -8.00 D , +0.50 D , +0.75 D , +1.00 D , +1.25 D , +1.50 D , +1.75 D , +2.00 D , +2.25 D , +2.50 D , +2.75 D , +3.00 D , +3.25 D , +3.50 D , +3.75 D , +4.00 D

Zakładanie soczewek

[EYEE/Porady/Soczewki jednodniowe](#)

Jednodniowe soczewki kontaktowe

EYEE BIOXY Daily

W celu założenia jednodniowych soczewek kontaktowych BIOXY Daily wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je. Zamiast wody i mydła, możesz użyć antybakteryjnego żelu EYEE Sanilon.
- Zerwij folię z opakowania i delikatnie wyjmij soczewkę BIOXY Daily. Przed kolejnym założeniem soczewki spłucz ją płynem lub solą fizjologiczną w celu usunięcia osadów.
- Umieść soczewkę BIOXY Daily na opuszku palca wskazującego i upewnij się, czy soczewka nie wywinęła się na drugą stronę i czy nie jest uszkodzona.
- Środkowym palcem ręki trzymającej soczewkę BIOXY Daily odciągnij dolną powiekę oka, a środkowym lub wskazującym palcem drugiej ręki przytrzymaj górną powiekę.
- Delikatnie umieść soczewkę na oku i powoli puść powieki. Mrugnij kilka razy.

-
- Powtórz te czynności zakładając drugą soczewkę BIOXY Daily.

W celu zdjęcia soczewek jednodniowych wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je. Zamiast wody i mydła, możesz użyć antybakteryjnego żelu EYEYE Sanilon.
- Jeśli odczuwasz suchość oczu, użyj kropli EYEYE Hydraclair przed ściągnięciem soczewek BIOXY Daily.
- Przytrzymaj dolną powiekę, spójrz w górę, a palcem wskazującym drugiej ręki zsuń soczewkę.
- Ostrożnie chwyć (uszczypnij) soczewkę BIOXY Daily za pomocą kciuka i palca wskazującego, a następnie ją wyjmij.
- W taki sam sposób postępuj z drugą soczewką BIOXY Daily.
- Zużyte soczewki jednodniowe BIOXY Daily wyrzuć do kosza.

Dodatkowe informacje

[EYEYE BIOXY Daily](#)

[Kontaktowe soczewki jednodniowe](#)

- Materiał hipoalergiczny z biokomponentami – naturalny komfort.
- Materiał niejonowany – mniej osadów, zabrudzeń, długa wygoda noszenia.
- Asferyczny kształt – brak

zniekształceń obrazu.

- Zaokrąglone i odwiedzone krawędzie - brak podrażnień oka.
- Wysoka transmisja tlenu.

SOCZEWKI EYEYE BIOXY Daily - SPECYFIKACJA

Uwodnienie: 58%

Materiał: BioxyGMA-hioxifilcon

Grubość: 0.09 mm (-3.00 D)

BC: 8.7 (asferyczna)

Dia: 14.2

Dk/t: 33

Całkowity zakres mocy od -8.00 do +4.00 D:

od -0.50 do -6.00 (co 0.25 D),

od -6.50 do -8.00 (co 0.50 D),

od +0.50 do +4.00 (co 0.25 D).


**EYEYE BIOXY Daily. ASFERYCZNE, BIOKOMPATYBILNE, JEDNODNIOWE
SOCZEWKI KONTAKTOWE**

Nowoczesny, aktywny styl życia wielu osób wymaga, aby noszone przez nich soczewki były coraz lepsze. Częste podróże, klimatyzacja w pomieszczeniach

budynków oraz długotrwałe korzystanie z komputerów powodują zmęczenie oczu, przejawia się uczuciem suchości, bólem czy też pogorszeniem widzenia.

Osoby noszące soczewki kontaktowe oczekują takich soczewek, które zwiększą komfort, polepszą widzenie oraz będą dostosowane do ich wymagającego trybu życia. Wychodząc naprzeciw życzeniom osób noszących soczewki oraz specjalistów, Barnaux Healthcare wprowadza na rynek nowe, jednodniowe soczewki kontaktowe EYEYE BIOXY Daily.

DOSKONAŁA BIOKOMPATYBILNOŚĆ

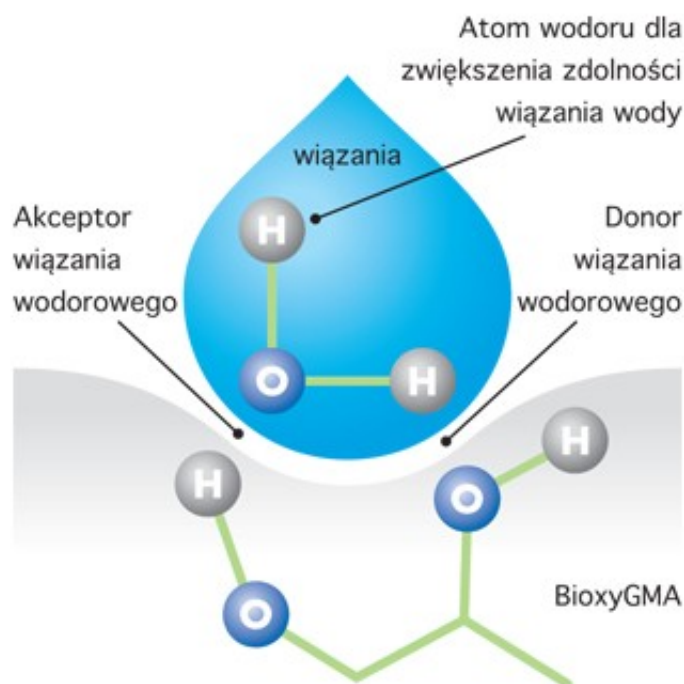

Biokompatybilny materiał soczewek EYEYE BIOXY Daily

Soczewki jednodniowe EYEYE BIOXY Daily wykonane zostały z biokompatybilnego materiału, którą osiągnięto poprzez eliminację reakcji alergicznych, nadwrażliwości lub innych działań ubocznych.

Stało się to możliwie dzięki odtworzeniu w materiale soczewkowym właściwości mucyny, produkowanej przez ciało ludzkie substancji nawilżającej.

Soczewki wyprodukowano z materiału BioxyGMA, który ma takie same właściwości, jak naturalny system nawilżający filmu łzowego. Rogówka chroniona jest przez warstwę mucynową, umożliwiającą filmowi łzowemu utrzymanie się na wodoodpornej rogówce.

Warstwa mucynowa wyrównuje ewentualne nieregularności, chroni powierzchnię rogówki przed wysuszeniem i usuwa zanieczyszczenia.

Oligosacharydy, które są istotną oznaką obecności glikoprotein, występujących w znacznych ilościach w mucynie, wiążą wodę. Cechę tą odwzorowano w materiale soczewkowym, dzięki czemu utrzymują one wilgoć przez długi czas.


Większy komfort noszenia

Strefa optyczna soczewki EYEYE BIOXY Daily stopniowo maleje, jej krawędź staje się cieńsza, dzięki czemu umożliwia ona dopływ tlenu, co zapewnia oczom większy komfort. Niejonowy charakter materiału, w połączeniu ze zmniejszonym wysuszaniem powoduje, że występuje o wiele mniej komplikacji spowodowanych noszeniem soczewek, takich jak podrażnienia, powstawanie plam, wysuszenie czy pogorszenie widzenia.

Lepsza zdolność widzenia dzięki asferycznemu kształtowi soczewki


Soczewki EYEYE BIOXY Daily są tak wykonane, że dzięki asferycznemu kształtowi korygowane są aberracje. Osoby noszące takie soczewki odczuwają to szczególnie podczas wieczornej jazdy samochodem. Kontrast ten jest o wiele lepszy, niż przy użyciu soczewek sferycznych.

Standardowa soczewka bez korekcji aberracji

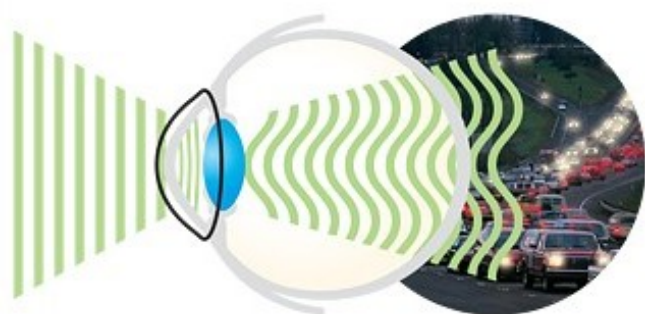

Padanie światła Nieskorygowany kąt padania światła Standardowy obraz

Korekcja aberracji soczewką asferyczną Bioxy

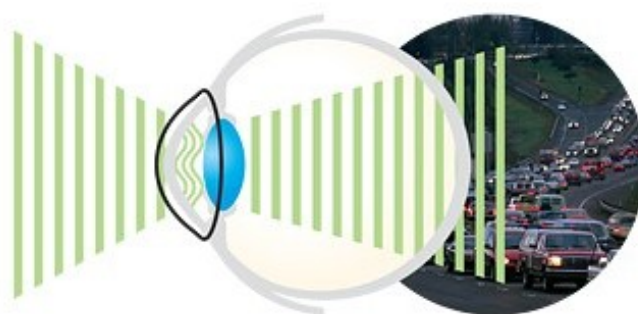


Padanie światła Skorygowany kąt padania światła Optymalizowany obraz

Osoby noszące soczewki EYEYE BIOXY Daily mogą odczuć takie korzyści jak:

- większy komfort
- dłuższy okres noszenia

- mniejsze dolegliwości oczu
- łatwość użytkowania
- zmniejszone osadzanie się białek
- brak reakcji alergicznych

Porównanie soczewek o tradycyjnych kształtach oraz soczewek EYEYE BIOXY Daily

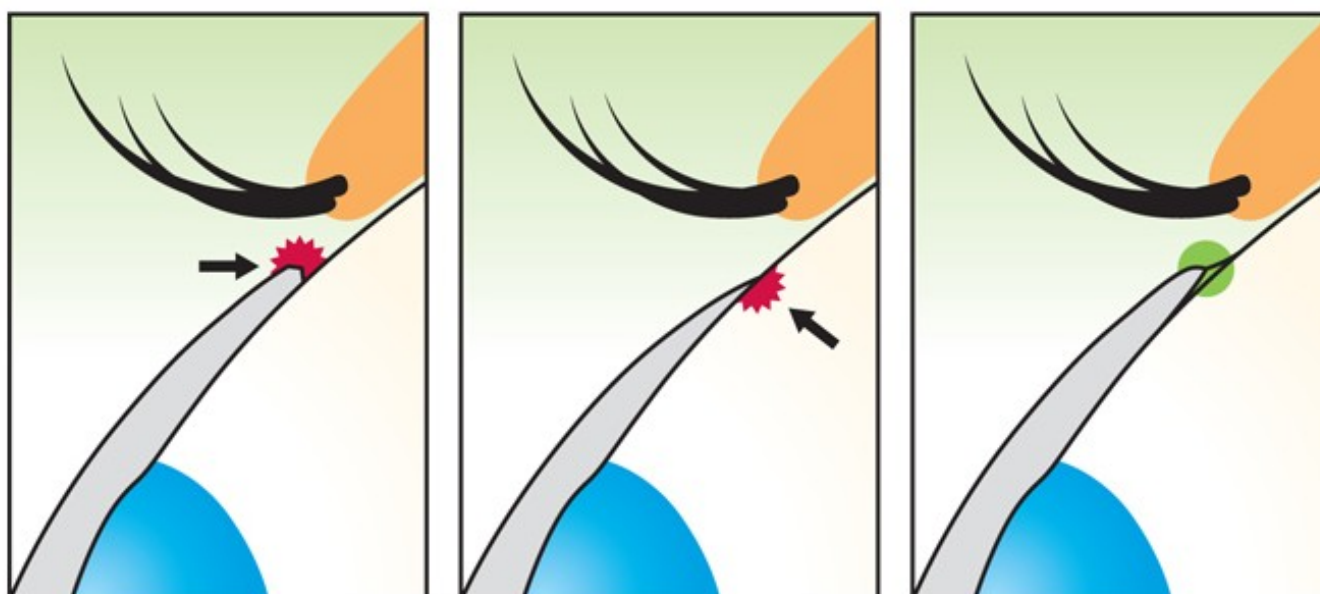

Soczewki jednodniowe EYEYE BIOXY Daily mają specjalnie zaprojektowany okrągły profil krawędzi. W porównaniu z innymi często używanymi soczewkami o tradycyjnym kształcie, istnieje znacznie mniej punktów kontaktu z powierzchnią oczu. Krawędź soczewki zwęża się, dzięki czemu nie obciąża ona nabłonka rogówki. Zapewnia to oczom większy komfort podczas noszenia soczewek EYEYE BIOXY Daily.