

Link do produktu: <https://www.e-soczewki24.pl/eyeye-bioxy-daily-90szt-soczewki-jednodniowe-p-5.html>

e-soczewki24.pl

## EYEEYE Bioxy Daily 90szt soczewki jednodniowe

Cena	<b>188,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>Clearlab SG Pte Ltd</b>

### Opis produktu

## EYEEYE Bioxy Daily 90szt

### Jednodniowe soczewki kontaktowe do dziennego noszenia

Soczewki wyprodukowano z materiału BioxyGMA, który ma takie same właściwości, jak naturalny system nawilżający filmu łzowego.

Rogówka chroniona jest przez warstwę mucynową, umożliwiającą filmowi łzowemu utrzymanie się na wodoodpornej rogówce.

Warstwa mucynowa wyrównuje ewentualne nieregularności, chroni powierzchnię rogówki przed wysuszeniem i usuwa zanieczyszczenia.

Oligosacharydy, które są istotną oznaką obecności glikoprotein występujących w znacznych ilościach w mucynie, wiążą wodę.

Cecha ta została odwzorowana w materiale soczewkowym, dzięki czemu soczewki utrzymują wilgoć przez długi czas.

Materiał hipoalergiczny z biokomponentami – naturalny komfort.

Materiał niejonowany – mniej osadów, zabrudzeń, wygoda noszenia.

Asferyczny kształt – brak zniekształceń obrazu.

Zaokrąglone i odwiedzione krawędzie – brak podrażnień oka.

Wysoka transmisja tlenu.

### PARAMETRY

#### Zakres mocy:

od – 0.50 do – 6.00 (co 0.25 D)

od – 6.50 do – 8.00 (co 0.50 D)

od + 0.50 do + 4.00 (co 0.25 D)

**Materiał:** 42% BioxyGMA-hioxifilcon A, 58% woda w ochronnej soli fizjologicznej

**Grubość:** 0,09mm (-3.00 D)

**BC:** 8.7 (-10.00 - +3,75), 8.8(+4.00 - +6.00)

**Dia:** 14.2

**Opakowanie:** 90szt tej samej mocy

Produkt jest wyrobem medycznym i posiada:

- znak CE 2460 (4-cyfrowy numer jednostki notyfikowanej)
  - oznakowanie i etykietę w języku polskim
  - informację o deklaracji zgodności UE

Produkt posiada dodatkowe opcje:

---

**Moc soczewek:** -0.50 D , -0.75 D , -1.00 D , -1.25 D , -1.50 D , -1.75 D , -2.00 D , -2.25 D , -2.50 D , -2.75 D , -3.00 D , -3.25 D , -3.50 D , -3.75 D , -4.00 D , -4.25 D , -4.50 D , -4.75 D , -5.00 D , -5.25 D , -5.50 D , -5.75 D , -6.00 D , -6.50 D , -7.00 D , -7.50 D , -8.00 D , +0.50 D , +0.75 D , +1.00 D , +1.25 D , +1.50 D , +1.75 D , +2.00 D , +2.25 D , +2.50 D , +2.75 D , +3.00 D , +3.25 D , +3.50 D , +3.75 D , +4.00 D

## Zakładanie soczewek

### EYEYE/Porady/Soczewki jednodniowe

Jednodniowe soczewki kontaktowe

EYEYE BIOXY Daily

### W celu założenia jednodniowych soczewek kontaktowych BIOXY Daily wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je. Zamiast wody i mydła, możesz użyć antybakteryjnego żelu EYEYE Sanilon.
- Zerwij folię z opakowania i delikatnie wyjmij soczewkę BIOXY Daily. Przed kolejnym założeniem soczewki spłucz ją płynem lub solą fizjologiczną w celu usunięcia osadów.
- Umieść soczewkę BIOXY Daily na opuszku palca wskazującego i upewnij się, czy soczewka nie wywinęła się na drugą stronę i czy nie jest uszkodzona.
- Środkowym palcem ręki trzymającej soczewkę BIOXY Daily odciągnij dolną powiekę oka, a środkowym lub wskazującym palcem drugiej ręki przytrzymaj górną powiekę.
- Delikatnie umieść soczewkę na oku i powoli puść powieki. Mrugnij kilka razy.
- Powtórz te czynności zakładając drugą soczewkę BIOXY Daily.

---

W celu zdjęcia soczewek jednodniowych wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je. Zamiast wody i mydła, możesz użyć antybakteryjnego żelu EYEYE Sanilon.
- Jeśli odczuwasz suchość oczu, użyj kropli EYEYE Hydraclair przed ściągnięciem soczewek BIOXY Daily.
- Przytrzymaj dolną powiekę, spójrz w górę, a palcem wskazującym drugiej ręki zsuń soczewkę.
- Ostrożnie chwyć (uszczypnij) soczewkę BIOXY Daily za pomocą kciuka i palca wskazującego, a następnie ją wyjmij.
- W taki sam sposób postępuj z drugą soczewką BIOXY Daily.
- Zużyte soczewki jednodniowe BIOXY Daily wyrzuć do kosza.

## Dodatkowe informacje

[EYEYE BIOXY Daily 90](#)

[Kontaktowe soczewki jednodniowe](#)

- Materia? hipoalergiczny z biokomponentami – naturalny komfort.
- Materia? niejonowany – mniej osadów, zabrudze?, d?uga wygoda noszenia.
- Asferyczny kształt – brak zniekształce? obrazu.
- Zaokr?glone i odwiedzione kraw?dzie



- 
- brak podrażnienia oka.
  - Wysoka transmisja tlenu.
  - Dostępne w ekonomicznych opakowaniach po 30 oraz 90 szt.

## **SOCZEWKI EYEYE BIOXY Daily 90 - SPECYFIKACJA**

**Uwodnienie:** 58%

**Materiał:** BioxyGMA-hioxifilcon

**Grubość:** 0.09 mm (-3.00 D)

**BC:** 8.7 (asferyczna)

**Dia:** 14.2

**Dk/t:** 33

**Całkowity zakres mocy od -8.00 do +4.00 D:**

od -0.50 do -6.00 (co 0.25 D),

od -6.50 do -8.00 (co 0.50 D),

od +0.50 do +4.00 (co 0.25 D).

## **EYEYE BIOXY Daily. ASFERYCZNE, BIOKOMPATYBILNE, JEDNODNIOWE SOCZEWKI KONTAKTOWE**


Nowoczesny, aktywny styl życia wielu osób wymaga, aby noszone przez nich soczewki były coraz lepsze. Częste podróże, klimatyzacja w pomieszczeniach budynków oraz długotrwałe korzystanie z komputerów powodują zmęczenie oczu, przejawia się uczuciem suchości, bólem czy też pogorszeniem widzenia.

---

Osoby noszące soczewki kontaktowe oczekują takich soczewek, które zwiększą komfort, polepszą widzenie oraz będą dostosowane do ich wymagającego trybu życia. Wychodząc naprzeciw życzeniom osób noszących soczewki oraz specjalistów, Barnaux Healthcare wprowadza na rynek nowe, jednodniowe soczewki kontaktowe EYEYE BIOXY Daily 90.

---

# DOSKONAŁA BIOKOMPATYBILNOŚĆ

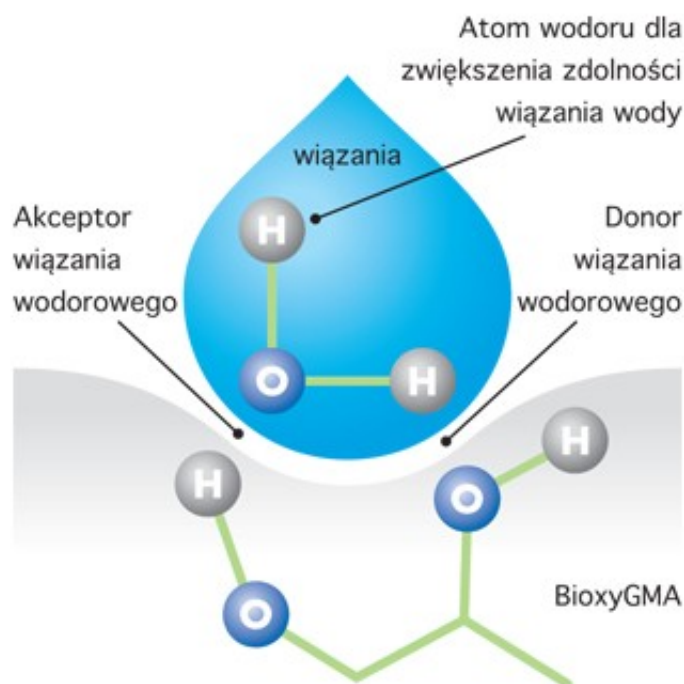

## Biokompatybilny materiał soczewek EYEYE BIOXY Daily

Soczewki jednodniowe EYEYE BIOXY Daily wykonane zostały z biokompatybilnego materiału, którą osiągnięto poprzez eliminację reakcji alergicznych, nadwrażliwości lub innych działań ubocznych.

Stało się to możliwe dzięki odtworzeniu w materiale soczewkowym właściwości mucyny, produkowanej przez ciało ludzkie substancji nawilżającej.

Soczewki wyprodukowano z materiału BioxyGMA, który ma takie same właściwości, jak naturalny system nawilżający filmu łzowego. Rogówka chroniona jest przez warstwę mucynową, umożliwiającą filmowi łzowemu utrzymanie się na wodoodpornej rogówce.

Warstwa mucynowa wyrównuje ewentualne nieregularności, chroni powierzchnię rogówki przed wysuszeniem i usuwa zanieczyszczenia.

---

Oligosacharydy, które są istotną oznaką obecności glikoprotein, występujących w znacznych ilościach w mucynie, wiążą wodę. Cechę tą odwzorowano w materiale soczewkowym, dzięki czemu utrzymują one wilgoć przez długi czas.


## Większy komfort noszenia

Strefa optyczna soczewki EYEYE BIOXY Daily stopniowo maleje, jej krawędź staje się cieńsza, dzięki czemu umożliwia ona dopływ tlenu, co zapewnia oczom większy komfort. Niejonowy charakter materiału, w połączeniu ze zmniejszonym wysuszaniem powoduje, że występuje o wiele mniej komplikacji spowodowanych noszeniem soczewek, takich jak podrażnienia, powstawanie plam, wysuszenie czy pogorszenie widzenia.

## Lepsza zdolność widzenia dzięki asferycznemu kształtowi soczewki


Soczewki EYEYE BIOXY Daily są tak wykonane, że dzięki asferycznemu kształtowi korygowane są aberracje. Osoby noszące takie soczewki odczuwają to szczególnie podczas wieczornej jazdy samochodem. Kontrast ten jest o wiele lepszy, niż przy użyciu soczewek sferycznych.

Standardowa soczewka bez korekcji aberracji

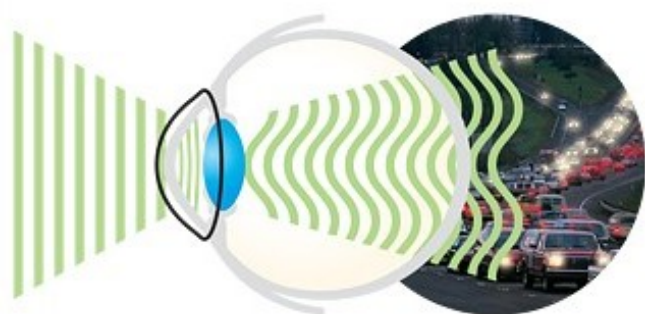

Padanie światła    Nieskorygowany kąt padania światła    Standardowy obraz

Korekcja aberracji soczewką asferyczną Bioxy

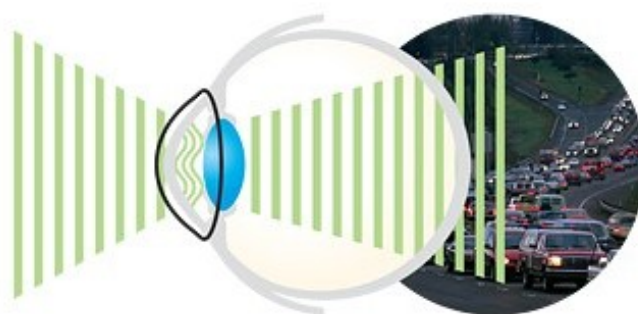


Padanie światła    Skorygowany kąt padania światła    Optymalizowany obraz

## Osoby noszące soczewki EYEYE BIOXY Daily mogą odczuć takie korzyści jak:

- większy komfort
- dłuższy okres noszenia

- mniejsze dolegliwości oczu
- łatwość użytkowania
- zmniejszone osadzanie się białek
- brak reakcji alergicznych

### Porównanie soczewek o tradycyjnych kształtach oraz soczewek EYEYE BIOXY Daily 90

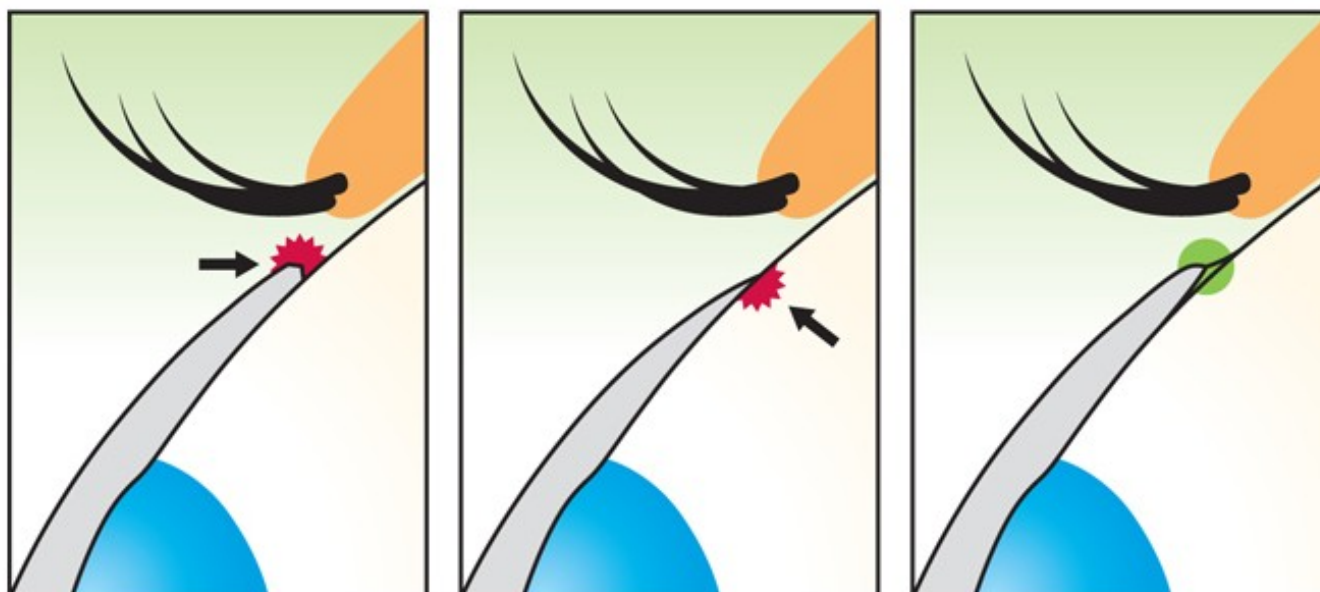

Soczewki jednodniowe EYEYE BIOXY Daily 90 mają specjalnie zaprojektowany okrągły profil krawędzi. W porównaniu z innymi często używanymi soczewkami o tradycyjnym kształcie, istnieje znacznie mniej punktów kontaktu z powierzchnią oczu. Krawędź soczewki zwięża się, dzięki czemu nie obciąża ona nabłonka rogówki. Zapewnia to oczom większy komfort podczas noszenia soczewek EYEYE BIOXY Daily.