

Link do produktu: <https://www.e-soczewki24.pl/eyeye-bioxy-wit-b5-all-in-one-100ml-wielofunkcyjny-plyn-do-soczewek-miekkich-p-7.html>



EYEEYE Bioxy wit B5 All in One 100ml wielofunkcyjny płyn do soczewek miękkich

Cena	15,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	BARNAUX

Opis produktu

EYEEYE Bioxy wit B5 All in One 100ml

Wielofunkcyjny płyn firmy **Barnaux** z prowitaminą B5 do czyszczenia i pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych.

Skład: Polyhexanide 0,0001 %, Poloxamine 0,5 %, Hydriflex™ 0,3%, Dexpanthenol 1,5 %.

Zawartość opakowania: butelka płynu 100ml , pojemnik na soczewki kontaktowe.

Data ważności : min. 2024-01.
Zawartość butelki należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od jej otwarcia.

EYEEYE Bioxy wit B5 All in One 100ml jest preparatem gwarantującym pełną ochronę soczewek i oka:

- czyści, płucze i dezynfekuje soczewki,
- usuwa osady białka ,
- nawilża i pielęgnuje oko, utrzymując odpowiednią wilgotność soczewek,
- chroni i wspomaga odbudowę uszkodzonych komórek nabłonkowych rogówki, jednocześnie ją odżywiając
- ułatwia zakładanie soczewek i ich przechowywanie.

Porady

EYEEYE All in One

Właściwe użycie płynu EYEEYE All in One jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek.

EYEYE All in One to płyn typu „Wszystko w jednym”, który został tak stworzony, aby połączyć łagodne, jednocześnie gruntowne czyszczenie soczewek, zapewniając doskonałą pielęgnacją oczu:

- czyszczenie i dezynfekcja w ciągu 4 godzin,
- usuwanie uporczywego osadu białkowego,
- powolne uwalnianie prowitaminy B5 z soczewki w celu wzmocnienia zdrowia rogówki.



EYEYE All in One - Wszystko w jednym dla Twoich oczu i soczewek kontaktowych


Czynniki niezbędne do właściwej, codziennej pielęgnacji Twoich soczewek z wykorzystaniem płynu EYEYE All in One:

- 1. Higiena:** przed zdejmowaniem soczewek kontaktowych z oczu lub wyjęciem ich z pojemnika należy starannie umyć ręce. Osusz ręce czystym ręcznikiem albo zastosuj specjalny preparat dezynfekujący dłonie **EYEYE Sanilon**.
- 2. Czyszczenie:** w przypadku wystąpienia dużych osadów białka lub zanieczyszczeń umieść soczewki na dłoni. Następnie wpuść kilka kropli roztworu **EYEYE All in One** na soczewki. Delikatnie pocieraj je palcem.
- 3. Płukanie:** przed dezynfekcją opłucz starannie soczewki płynem **EYEYE All in One**, po czym umieść je w pojemniku na soczewki.
- 4. Dezynfekcja i przechowywanie:** wypełnij pojemnik roztworem **EYEYE All in One**. Pozostaw soczewki w pojemniku na

co najmniej 4 godziny.

5. Zakładanie: wyjmij soczewki z pojemnika po zakończeniu cyklu ich dezynfekcji, opłucz je roztworem **EYEYE All in One** i załóż soczewki do oczu. Opłucz pojemnik na soczewki płynem lub solą fizjologiczną **EYEYE Saline**, pozostaw pojemnik do wyschnięcia na powietrzu.

6. Nawilżanie: jeśli odczuwasz niewielkie podrażnienia podczas noszenia soczewek kontaktowych, zapuść do oka kroplę **EYEYE All in One** i kilkakrotnie zamrugaj. Możesz przy tym pozostawić soczewkę w oku. Jeśli podrażnienia nie ustąpią, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

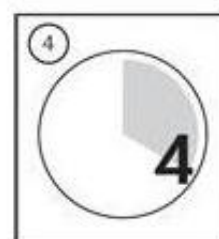

EYEYE All in One – Zalecenia:

- Należy zużyć zawartość butelki **EYEYE All in One** w ciągu 2 miesięcy od jej otwarcia.
- Nie używać **EYEYE All in One** po upływie terminu przydatności.
- Przechowywać butelkę **EYEYE All in One** w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C.
- Należy zamykać butelkę **EYEYE All in One** bezpośrednio po użyciu.
- W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki.
- Trzymać płyn **EYEYE All in One** poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli zalecono Ci lek do oczu, przed użyciem leku w połączeniu z

soczewkami kontaktowymi oraz **EYEYE All in One**, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

Wskazówki przydatne odnośnie właściwego użycia soczewek oraz pojemnika na soczewki:

- Zaleca się używanie nowego pojemnika na soczewki kontaktowe po 3 miesiącach, aby był on czysty i wolny od bakterii.
- Zawsze natychmiast usuwaj zużyty roztwór. Następnie opłucz pojemnik roztworem **EYEYE All in One**, aby go zdezynfekować. Pozwól mu wyschnąć na powietrzu. NIE osuszaj pojemnika ściereczką.
- Unikaj używania wody z kranu do soczewek oraz do pojemnika. Niektóre typy soczewek mogą ulec deformacji w kontakcie z wodą.
- Jeśli soczewki pozostają w roztworze płynu **EYEYE All in One** dłużej niż kilka dni, zaleca się ponowne zdezynfekowanie soczewek.

Skutki uboczne

Nie używać **EYEYE All in One** przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu!