

Link do produktu: <https://www.e-soczewki24.pl/eyeye-bioxy-wit-b5-all-in-one-500ml-wielofunkcyjny-plyn-do-soczewek-miekkich-p-8.html>



## EYEEYE Bioxy wit B5 All in One 500ml wielofunkcyjny płyn do soczewek miękkich

Cena	<b>26,87 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>BARNAUX</b>

### Opis produktu

#### EYEEYE Bioxy wit B5 All in One 500ml

Wielofunkcyjny płyn firmy **Barnaux** z prowitaminą B5 do czyszczenia i pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych.

**Skład:** Polyhexanide 0,0001 %, Poloxamine 0,5 %, Hydriflex™ 0,3%, Dexpanthenol 1,5 %.

**Zawartość opakowania:** butelka płynu 500ml , pojemnik na soczewki kontaktowe.

**Data ważności :** 2022-10.  
Zawartość butelki należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od jej otwarcia.

EYEEYE Bioxy wit B5 All in One 500ml jest preparatem gwarantującym pełną ochronę soczewek i oka:

- czyści, płucze i dezynfekuje soczewki,
- usuwa osady białka ,
- nawilża i pielęgnuje oko, utrzymując odpowiednią wilgotność soczewek,
- chroni i wspomaga odbudowę uszkodzonych komórek nabłonkowych rogówki, jednocześnie ją odżywiając
- ułatwia zakładanie soczewek i ich przechowywanie.

### Porady

EYEEYE All in One

**Właściwe użycie płynu EYEEYE All in One jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek.**

**EYEYE All in One** to płyn typu „Wszystko w jednym”, który został tak stworzony, aby połączyć łagodne, jednocześnie gruntowne czyszczenie soczewek, zapewniając doskonałą pielęgnacją oczu:

- czyszczenie i dezynfekcja w ciągu 4 godzin,
- usuwanie uporczywego osadu białkowego,
- powolne uwalnianie witaminy B5 z soczewki w celu wzmocnienia zdrowia rogówki.



## EYEYE All in One - Wszystko w jednym dla Twoich oczu i soczewek kontaktowych


### Czynniki niezbędne do właściwej, codziennej pielęgnacji Twoich soczewek z wykorzystaniem płynu EYEYE All in One:

- 1. Higiena:** przed zdejmowaniem soczewek kontaktowych z oczu lub wyjęciem ich z pojemnika należy starannie umyć ręce. Osusz ręce czystym ręcznikiem albo zastosuj specjalny preparat dezynfekujący dłonie **EYEYE Sanilon**.
- 2. Czyszczenie:** w przypadku wystąpienia dużych osadów białka lub zanieczyszczeń umieść soczewki na dłoni. Następnie wpuść kilka kropli roztworu **EYEYE All in One** na soczewki. Delikatnie pocieraj je palcem.
- 3. Płukanie:** przed dezynfekcją opłucz starannie soczewki płynem **EYEYE All in One**, po czym umieść je w pojemniku na soczewki.
- 4. Dezynfekcja i przechowywanie:** wypełnij pojemnik roztworem **EYEYE All in One**. Pozostaw soczewki w pojemniku na

co najmniej 4 godziny.

**5. Zakładanie:** wyjmij soczewki z pojemnika po zakończeniu cyklu ich dezynfekcji, opłucz je roztworem **EYEYE All in One** i załóż soczewki do oczu. Opłucz pojemnik na soczewki płynem lub solą fizjologiczną **EYEYE Saline**, pozostaw pojemnik do wyschnięcia na powietrzu.

**6. Nawilżanie:** jeśli odczuwasz niewielkie podrażnienia podczas noszenia soczewek kontaktowych, zapuść do oka kroplę **EYEYE All in One** i kilkakrotnie zamrugaj. Możesz przy tym pozostawić soczewkę w oku. Jeśli podrażnienia nie ustąpią, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

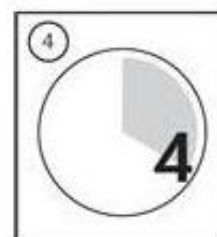

## EYEYE All in One – Zalecenia:

- Należy zużyć zawartość butelki **EYEYE All in One** w ciągu 2 miesięcy od jej otwarcia.
- Nie używać **EYEYE All in One** po upływie terminu przydatności.
- Przechowywać butelkę **EYEYE All in One** w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C.
- Należy zamykać butelkę **EYEYE All in One** bezpośrednio po użyciu.
- W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki.
- Trzymać płyn **EYEYE All in One** poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli zalecono Ci lek do oczu, przed użyciem leku w połączeniu z

---

soczewkami kontaktowymi oraz **EYEYE All in One**, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

### Wskazówki przydatne odnośnie właściwego użycia soczewek oraz pojemnika na soczewki:

- Zaleca się używanie nowego pojemnika na soczewki kontaktowe po 3 miesiącach, aby był on czysty i wolny od bakterii.
- Zawsze natychmiast usuwaj zużyty roztwór. Następnie opłucz pojemnik roztworem **EYEYE All in One**, aby go zdezynfekować. Pozwól mu wyschnąć na powietrzu. NIE osuszaj pojemnika ściereczką.
- Unikaj używania wody z kranu do soczewek oraz do pojemnika. Niektóre typy soczewek mogą ulec deformacji w kontakcie z wodą.
- Jeśli soczewki pozostają w roztworze płynu **EYEYE All in One** dłużej niż kilka dni, zaleca się ponowne zdezynfekowanie soczewek.

### Skutki uboczne

Nie używać **EYEYE All in One** przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu!