

Link do produktu: <https://www.e-soczewki24.pl/eyeye-crystal-cleaner-40ml-srodek-czyszczacy-do-soczewek-p-16.html>



EYEE Crystal Cleaner 40ml środek czyszczący do soczewek

Cena **22,03 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **BARNAUX**

Opis produktu

EYEE Crystal Cleaner 40ml

Środek czyszczący (mydło) firmy BARNAUX do soczewek miękkich i twardych.

Skład: Amphoteric, Pluronic, Propandiol.

Opakowanie: 40ml

Data ważności : min. 2024-05.

EYEE Crystal Cleaner:

- skutecznie usuwa osady
- bezpieczny i łatwy w użyciu
- najlepsze efekty w połączeniu z EYEE B5 Active lub EYEE B5 Conditioner

Porady

[EYEE Crystal Cleaner](#)

Środek czyszczący do twardych soczewek kontaktowych


Czynniki niezbędne do właściwej codziennej obsługi Twoich twardych soczewek z użyciem roztworu EYEE Crystal Cleaner:

1. Higiena: Starannie umyj ręce, po czym osusz je czystym ręcznikiem. Możesz zastosować do mycia rąk żel antybakteryjny EYEYE Sanilon.

2. Czyszczenie: Połóż twardą soczewkę na dłoni. Następnie wpuść kilka kropli płynu EYEYE Crystal Cleaner na soczewkę i delikatnie ją pocieraj przez 20-30 sekund.

3. Płukanie: Opłucz starannie soczewki twarde roztworem EYEYE EYEYE B5 Conditioner lub EYEYE B5 Active.

4. Dezynfekcja i przechowywanie: Wypełnij pojemnik roztworem EYEYE B5 Conditioner lub EYEYE Crystal Cleaner. Pozostaw soczewki w pojemniku na trwający co najmniej cztery godziny cykl ich oczyszczania.

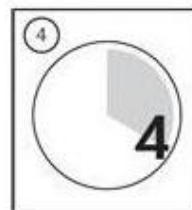

Środek EYEYE Crystal Cleaner

Właściwe użycie płynu EYEYE Crystal Cleaner jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek.

EYEYE Crystal Cleaner to preparat stosowany do wszystkich typów soczewek kontaktowych gazo-przepuszczalnych oraz twardych soczewek kontaktowych. Ze względu na unikalny skład skutecznie usuwa osady z powierzchni soczewek.

EYEYE Crystal Cleaner – Ostrzeżenia:

- NIGDY nie należy dopuścić do dostania się EYEYE Crystal Cleaner do oka!
- Nie używać preparatu EYEYE Crystal Cleaner po upływie terminu przydatności.
- Należy zużyć zawartość EYEYE Crystal Cleaner w ciągu 4 miesięcy od jej otwarcia.
- Wstrząsnąć przed użyciem.
- W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki.
- Należy zamykać butelkę EYEYE Crystal Cleaner bezpośrednio po użyciu.
- Przechowywać butelkę w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C.
- Trzymać preparat EYEYE Crystal Cleaner poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku podrażnienia oczu należy natychmiast przestać używać roztworu EYEYE Crystal Cleaner oraz skonsultować się z okulistą lub optometrystą.

Skutki uboczne:

Nie używaj EYEYE Crystal Cleaner przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu.