

Link do produktu: <https://www.e-soczewki24.pl/eyeye-crystal-cleaner-40ml-srodek-czyszczacy-do-soczewek-p-16.html>



## EYEEYE Crystal Cleaner 40ml środek czyszczący do soczewek

Cena	<b>22,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>BARNAUX</b>

### Opis produktu

#### EYEEYE Crystal Cleaner 40ml

Środek czyszczący (mydło) firmy BARNAUX do soczewek miękkich i twardych.

**Skład:** Amphoteric, Pluronic, Propandiol.

**Opakowanie:** 40ml

**Data ważności :** min. 2028-05

#### EYEEYE Crystal Cleaner:

- skutecznie usuwa osady
- bezpieczny i łatwy w użyciu
- najlepsze efekty w połączeniu z EYEEYE B5 Active lub EYEEYE B5 Conditioner

Produkt jest wyrobem medycznym i posiada:

- znak CE 0344 (4-cyfrowy numer jednostki notyfikowanej)
- oznakowanie i etykietę w języku polskim
- instrukcję w języku polskim
- informację o deklaracji zgodności UE

### Porady

[EYEEYE Crystal Cleaner](#)

Środek czyszczący do twardych soczewek kontaktowych


Czynniki niezbędne do właściwej codziennej obsługi Twoich twardych soczewek z użyciem roztworu EYEEYE Crystal Cleaner:

**1. Higiena:** Starannie umyj ręce, po czym osusz je czystym ręcznikiem. Możesz zastosować do mycia rąk żel antybakteryjny EYEYE Sanilon.

**2. Czyszczenie:** Połóż twardą soczewkę na dłoni. Następnie wpuść kilka kropli płynu EYEYE Crystal Cleaner na soczewkę i delikatnie ją pocieraj przez 20-30 sekund.

**3. Płukanie:** Opłucz starannie soczewki twarde roztworem EYEYE EYEYE B5 Conditioner lub EYEYE B5 Active.

**4. Dezynfekcja i przechowywanie:** Wypełnij pojemnik roztworem EYEYE B5 Conditioner lub EYEYE Crystal Cleaner. Pozostaw soczewki w pojemniku na trwający co najmniej cztery godziny cykl ich oczyszczania.

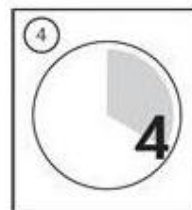

Środek EYEYE Crystal Cleaner

**Właściwe użycie płynu EYEYE Crystal Cleaner jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek.**

EYEYE Crystal Cleaner to preparat stosowany do wszystkich typów soczewek kontaktowych gazo-przepuszczalnych oraz twardych soczewek kontaktowych. Ze względu na unikalny skład skutecznie usuwa osady z powierzchni soczewek.

---

### EYEYE Crystal Cleaner – Ostrzeżenia:

- NIGDY nie należy dopuścić do dostania się EYEYE Crystal Cleaner do oka!
- Nie używać preparatu EYEYE Crystal Cleaner po upływie terminu przydatności.
- Należy zużyć zawartość EYEYE Crystal Cleaner w ciągu 4 miesięcy od jej otwarcia.
- Wstrząsnąć przed użyciem.
- W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki.
- Należy zamykać butelkę EYEYE Crystal Cleaner bezpośrednio po użyciu.
- Przechowywać butelkę w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C.
- Trzymać preparat EYEYE Crystal Cleaner poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku podrażnienia oczu należy natychmiast przestać używać roztworu EYEYE Crystal Cleaner oraz skonsultować się z okulistą lub optometrystą.

### Skutki uboczne:

Nie używaj EYEYE Crystal Cleaner przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu.