

Link do produktu: <https://www.e-soczewki24.pl/eyeye-i-comfort-100ml-plyn-z-hialuronianem-do-pielęgnacji-soczewek-miekkich-p-63.html>



EYEEYE I-COMFORT 100ml płyn z Hialuronianem do pielęgnacji soczewek miękkich

Cena	17,11 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	BARNAUX

Opis produktu

EYEEYE I-COMFORT 100ml

Wielofunkcyjny płyn z Hialuronianem firmy **Barnaux** do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych

Skład: Polyquaternium, Hyaluronate, PHMB 0,0001%.

Zawartość opakowania: butelka płynu 100ml , pojemnik na soczewki kontaktowe.

Data ważności: min. 6 miesięcy od daty zakupu
Zawartość butelki należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od jej otwarcia.

EYEEYE I-COMFORT to wielofunkcyjny płyn klasy Premium z Hialuronianem do czyszczenia, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, płukania, przechowywania, nakładania i nawilżania miękkich soczewek kontaktowych. Zalecany do oczu wrażliwych.

- podwójny system dezynfekcyjny, oparty na PHMB oraz Poliquaternianie,
- wyjątkowy komfort dzięki wysokiej jakości Hialuronianowi,
- skuteczne usuwanie osadów białek oraz lipidów,
- nie zawiera żadnych substancji toksycznych ani odzwierzęcych
- preparat o neutralnym pH, doskonały do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych
- zalecany do soczewek silikonowo-hydrożelowych.

Zawiera Hialuronian sodu, biopolimer o wyjątkowych właściwościach wiskoelastycznych (będących połączeniem lepkości i elastyczności), poprawia nawilżanie i bio-tolerancję soczewek.

Badania prowadzone nad poziomem pH oraz osmolalnością, zapewniły osiągnięcie pełnej biokompatybilności EYEEYE I●COMFORT z tkankami oczu i płynami organicznymi. Płyn produkowany jest w warunkach sterylnych.

System Waterlock skutecznie nawilża soczewki

Płyn wielofunkcyjny EYEEYE I●COMFORT, dzięki właściwościom wiązania wody (System Waterlock), nawilża soczewki nie tylko bezpośrednio po jego zastosowaniu, ale także przez cały dzień podczas ich noszenia. Zwiększa również komfort, zmniejszając suchość oczu i poziom podrażnień.

Silna formuła czyszcząca zapewnia wyjątkowy komfort

EYEEYE I●COMFORT jest innowacyjnym płynem wielofunkcyjnym, łączącym bezpieczeństwo oraz komfort dzięki systemowi podwójnej dezynfekcji oraz zastosowaniu wysokiej jakości Hialuronianu.

Delikatność dzięki zastosowaniu Hialuronianu

Naturalna substancja nawilżająca, jaką jest biopolimer Hialuronian, zapobiega wysychaniu powierzchni oczu oraz soczewek,

powodując zwiększenie komfortu ich noszenia.

EYEYE I●COMFORT zawiera wysokiej jakości Hialuronian wytwarzany w ekologicznym procesie opartym na wodzie. W związku z tym nie zawiera żadnych substancji toksycznych lub odzwierzęcych i dzięki temu działa bezpiecznie oraz skutecznie.

Długotrwałe działanie antybakteryjne

Preparat EYEYE I●COMFORT zapewnia optymalny komfort noszenia soczewek. Ma również bardzo silne właściwości dezynfekujące, uzyskiwane dzięki efektowi synergii dwóch substancji dezynfekujących: PHMB i Poliquaternianu.

Płyn wielofunkcyjny EYEYE I●COMFORT plasuje się znacznie powyżej wymagań, które opisuje Norma 1 ISO 14279, co pozwala na naprawdę bezpieczne noszenie soczewek kontaktowych.

Porady

EYEYE I●COMFORT

NOWO??!

Ważne użycie EYEYE I●COMFORT jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek.

Preparat **EYEYE I●COMFORT** to nowy, wielofunkcyjny płyn, zawierający biopolimer Hialuronian, o wyjątkowych właściwościach wiskoelastycznych.

Płyn **EYEYE I●COMFORT** poprawia nawilżanie oraz bio-tolerancję soczewek. Preparat przeznaczony jest do czyszczenia, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, płukania, przechowywania, nakładania oraz nawilżania soczewek kontaktowych.




EYEYE I●COMFORT – Najnowszy płyn, który ochroni Twoje oczy i soczewki kontaktowe

Czynniki niezbędne do właściwej, codziennej pielęgnacji Twoich soczewek z wykorzystaniem płynu EYEYE I●COMFORT:

- 1. Higiena:** Przed zdejmowaniem soczewek lub wyjmowaniem ich z pojemnika należy starannie umyć ręce. Osusz ręce czystym ręcznikiem. Możesz zastosować specjalny preparat dezynfekujący

dłonie **EYEYE Sanilon**.

- 2. Czyszczenie:** W przypadku wystąpienia dużych osadów białka i zanieczyszczeń umieść soczewki na dłoni. Następnie wpuść kilka kropli **EYEYE I●COMFORT** na soczewki kontaktowe. Delikatnie pocieraj je palcem.
- 3. Płukanie:** Przed dezynfekcją opłucz starannie soczewki kontaktowe płynem **EYEYE I●COMFORT**, po czym umieść je w pojemniku na soczewki.
- 4. Dezynfekcja i przechowywanie:** wypełnij pojemnik płynem **EYEYE I●COMFORT**. Pozostaw soczewki kontaktowe w pojemniku na co najmniej 4 godziny.
- 5. Zakładanie:** Wyjmij soczewki kontaktowe z pojemnika po zakończeniu cyklu ich dezynfekcji, opłucz je roztworem **EYEYE I●COMFORT** i załóż soczewki do oczu. Opłucz pojemnik na soczewki płynem lub solą fizjologiczną **EYEYE Saline**, pozostaw pojemnik do wyschnięcia na powietrzu.
- 6. Nawilżanie:** Jeśli odczuwasz niewielkie podrażnienia podczas noszenia soczewek kontaktowych, zapuść do oka kroplę **EYEYE I●COMFORT** i kilkakrotnie zamrugaj. Możesz przy tym pozostawić soczewkę w oku. Jeśli podrażnienia nie ustąpią, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

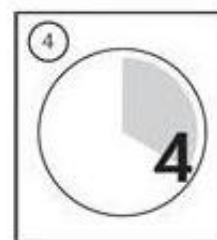

EYEYE I●COMFORT all in one – Nowoczesna ochrona Twoich oczu i soczewek kontaktowych

Przy użyciu płynu **EYEYE I●COMFORT** soczewki kontaktowe poddane są czyszczeniu oraz dezynfekcji podczas jednego procesu. System HydraFlex™ zawiera kombinację różnych składników, powodujących usuwanie z soczewek osadów białka. Zapewnia Twoim oczom głęboko kojące odczucie.

Unikalne połączenie 3 naturalnie wytwarzanych przez organizm składników płynu **EYEYE I●COMFORT** zapewnia najwyższy komfort noszenia soczewek:

- **Prowitamina B5** chroni, odżywia i wspomaga samoregenerację rogówki.
- **Karnozyna** jest najskuteczniejszym przeciwutleniaczem, który pomaga eliminować wolne rodniki, mogące niszczyć komórki rogówki, a nawet niweluje wczesne uszkodzenia.
- **Hialuronian** ochrania powłokę łzową i powoduje optymalne nawilżenie soczewek.

EYEYE I●COMFORT służy do przechowywania, czyszczenia, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, płukania, nawilżania. Ułatwia zakładanie soczewek oraz pielęgnuje oko... Wszystko w jednym!

EYEYE I●COMFORT – Zalecenia:

- Należy zużyć zawartość **EYEYE I●COMFORT** w ciągu 2 miesięcy od jej otwarcia.
- Nie używać **EYEYE I●COMFORT** po upływie terminu przydatności.
- Przechowywać **EYEYE I●COMFORT** w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C.
- Należy zamykać butelkę **EYEYE I●COMFORT** bezpośrednio po użyciu.
- W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli zalecono Ci lek do oczu, przed użyciem leku w połączeniu z soczewkami kontaktowymi, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

Wskazówki przydatne odnośnie właściwego użycia soczewek oraz pojemnika na soczewki:

- Zaleca się używanie nowego pojemnika na soczewki kontaktowe po 3

miesiącach, aby był on czysty i wolny od bakterii.

- Zawsze natychmiast usuwaj zużyty roztwór. Następnie opłucz pojemnik roztworem **EYEYE I●COMFORT**, aby go zdezynfekować. Pozwól mu wyschnąć na powietrzu. NIE osuszaj pojemnika ściereczką.
- Unikaj używania wody z kranu do soczewek oraz do pojemnika. Niektóre typy soczewek mogą ulec deformacji w kontakcie z wodą.
- Jeśli soczewki pozostają w roztworze płynu **EYEYE I●COMFORT** dłużej niż kilka dni, zaleca się ponowne zdezynfekowanie soczewek.

Skutki uboczne

Nie używać **EYEYE I●COMFORT** przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu!

Dodatkowe informacje

EYEYE I-COMFORT

Nowy wielofunkcyjny preparat z Hialuronianem

do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych

- Podwójny system dezynfekcyjny, oparty na PHMB oraz Poliquaternianie.
- Wyjątkowy komfort dzięki wysokiej jakości Hialuronianowi.
- Skuteczne usuwanie osadów białek oraz lipidów.
- Nie zawiera żadnych substancji toksycznych ani odzwierzęcych.

- Preparat o neutralnym pH.
- Doskonały do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych.
- Zalecany do soczewek kontaktowych silikonowo-hydrożelowych.
- Opakowanie 100 ml – idealne w podróży.



SKŁAD: Polyquaternium, Hyaluronate, PHMB 0,0001%.

OPAKOWANIE: 100 ml, z pojemnikiem na soczewki.

EYEYE I●COMFORT all in

NOWOŚĆ!

one

Wielofunkcyjny płyn klasy Premium z Hialuronianem do miękkich soczewek kontaktowych

EYEYE I●COMFORT to płyn wielofunkcyjny z Hialuronianem do czyszczenia, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, płukania, przechowywania, nakładania i nawilżania miękkich soczewek kontaktowych.

NOWY WIELOFUNKCYJNY PŁYN Z HIALURONIANEM SODU, ZALECANY DO OCZU WRAŻLIWYCH

Zawiera Hialuronian sodu, biopolimer o wyjątkowych właściwościach wiskoelastycznych (będących połączeniem lepkości i elastyczności), poprawia nawilżanie oraz bio-tolerancję soczewek.

Badania prowadzone nad poziomem pH oraz osmolalnością, zapewniły osiągnięcie pełnej biokompatybilności preparatu **EYEYE I●COMFORT** z tkankami oczu i płynami organicznymi. Płyn produkowany jest w warunkach sterylnych.

System Waterlock skutecznie nawilża soczewki

Płyn wielofunkcyjny **EYEYE I●COMFORT**, dzięki właściwościom wiązania wody (*System Waterlock*), nawilża soczewki nie tylko bezpośrednio po jego zastosowaniu, ale także przez cały dzień podczas ich noszenia. Zwiększa również komfort, zmniejszając suchość oczu oraz poziom podrażnień.

Silna formuła czyszcząca zapewnia wyjątkowy komfort

EYEYE I●COMFORT jest innowacyjnym płynem wielofunkcyjnym, łączącym bezpieczeństwo oraz komfort dzięki systemowi podwójnej dezynfekcji oraz zastosowaniu wysokiej jakości Hialuronianu.

Delikatność dzięki zastosowaniu Hialuronianu

Naturalna substancja nawilżająca, jaką jest biopolimer Hialuronian, zapobiega wysychaniu powierzchni oczu oraz soczewek, powodując zwiększenie komfortu ich noszenia.

EYEYE I●COMFORT zawiera wysokiej jakości Hialuronian wytwarzany w ekologicznym procesie opartym na wodzie. W związku z tym nie zawiera żadnych substancji toksycznych lub odzwierzęcych i dzięki temu działa bezpiecznie oraz skutecznie.

Długotrwałe działanie antybakteryjne

Preparat **EYEYE I●COMFORT** zapewnia optymalny komfort noszenia soczewek. Ma również bardzo silne właściwości dezynfekujące, uzyskiwane dzięki efektowi synergii dwóch substancji dezynfekujących: PHMB i Poliquaternianu.

Płyn wielofunkcyjny **EYEYE I●COMFORT** plasuje się znacznie powyżej wymagań, które opisuje Norma 1 ISO 14279, co pozwala na naprawdę bezpieczne noszenie soczewek kontaktowych.

W jaki sposób EYEYE I●COMFORT ochrania oczy?

EYEYE I●COMFORT to płyn nowej generacji, nie zawiera żadnych substancji toksycznych ani odzwierzęcych, posiada neutralne pH, dlatego polecany jest także dla alergików.

Podwójna ochrona antybakteryjna

Bakterie mogą pojawić się na soczewkach w wyniku kontaktu z rękoma lub pojemnikiem do przechowywania soczewek albo dotknięcia końcówką zakraplającą do innej powierzchni.



ANTI BACTERIAL

Podwójny system dezynfekcyjny **EYEYE I●COMFORT**, oparty na PHMB oraz Poliquaternianie, efektywnie ochroni oczy przed bakteriami, zmniejszając ich obecność do nieszkodliwego poziomu.



COMFORT

Naturalne nawilżanie dzięki Hialuronianowi

Zawarty płyn **EYEYE I●COMFORT** biopolimer nawilżający, o wyjątkowych właściwościach wiskoelastycznych (lepki i elastyczny). Staje się cieńszy przy zamykaniu powiek oczu, a rozszerza się pomiędzy mrugnięciami, poprawia nawilżanie oraz bio-tolerancję soczewek.

Pełni funkcję naturalnego „smaru” w ludzkim ciele. Jego zdolność wiązania wody tysiąckrotnie przewyższa jego masę. Chroni błonę powłoki łzowej, ogranicza parowanie, mogące powodować wysuszenie soczewek i oczu. Zwiększa zdolność wytwarzania łez, doskonale chroni soczewki przed wyschnięciem, zapewnia większy komfort ich użytkowania.



BIO-SAFE

Bezpieczny dla oczu i środowiska

Płyn **EYEYE I●COMFORT** produkowany w opartym na wodzie ekologicznym procesie, w warunkach sterylnych. Nie zawiera żadnych substancji toksycznych ani pochodzenia zwierzęcego.

Składniki płynu zostały starannie dobrane tak, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych oraz podrażnień. Płyn jest bezpieczny pod względem fizjologicznym.

Preparat EYEYE

I●COMFORT Pozostałe cechy:



SiH APPROVED

Doskonały do soczewek silikonowo-hydrożelowych

Unikalne składniki płynu EYEYE I●COMFORT powodują, że nadaje się on znakomicie do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych, także silikonowo-hydrożelowych oraz soczewek biokompatybilnych.

Preparat EYEYE I●COMFORT przeznaczony jest do czyszczenia, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, płukania, przechowywania, nakładania oraz nawilżania miękkich soczewek kontaktowych.



pH-NEUTRAL

Neutralny poziom pH

Specjalne badania laboratoryjne, prowadzone nad poziomem pH oraz osmolalnością, zapewniły osiągnięcie pełnej biokompatybilności płynu **EYEYE I●COMFORT** z tkankami oczu oraz płynami organicznymi.

Płyn służy do czyszczenia oraz dezynfekcji wszystkich typów miękkich soczewek kontaktowych.

Eliminuje białka i lipidy

Zadaniem płynu **EYEYE I●COMFORT** jest maksymalne ograniczenie rozwoju bakterii oraz zminimalizowanie możliwości uszkodzenia powierzchni oczu.



REMOVES LIPID

Płyn skutecznie usuwa osady białkowe i lipidowe. Soczewki pozostają czyste oraz dokładnie zdezynfekowane.

