

Link do produktu: <https://www.e-soczewki24.pl/eyeye-i-comfort-360ml-plyn-z-hialuronianem-do-pielęgnacji-soczewek-miekkich-p-62.html>



## EYEEYE I-COMFORT 360ml płyn z Hialuronianem do pielęgnacji soczewek miękkich

Cena	<b>26,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Producent	<b>BARNAUX</b>

### Opis produktu

#### EYEEYE I-COMFORT 360ml

Nowy, wielofunkcyjny płyn z Hialuronianem firmy **Barnaux** do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych

**Skład:** Polyquaternium, Hyaluronate, PHMB 0,0001%.

**Zawartość opakowania:** butelka płynu 360ml , pojemnik na soczewki kontaktowe.

**Data ważności :** min. 2022-08.  
Zawartość butelki należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od jej otwarcia.

**EYEEYE I-COMFORT** to wielofunkcyjny płyn klasy Premium z Hialuronianem do czyszczenia, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, płukania, przechowywania, nakładania i nawilżania miękkich soczewek kontaktowych. Zalecany do oczu wrażliwych.

- podwójny system dezynfekcyjny, oparty na PHMB oraz Poliquaternianie,
- wyjątkowy komfort dzięki wysokiej jakości Hialuronianowi,
- skuteczne usuwanie osadów białek oraz lipidów,
- nie zawiera żadnych substancji toksycznych ani odzwierzęcych
- preparat o neutralnym pH, doskonały do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych
- zalecany do soczewek silikonowo-hydrożelowych.

Zawiera Hialuronian sodu, biopolimer o wyjątkowych właściwościach wiskoelastycznych (będących połączeniem lepkości i elastyczności), poprawia nawilżanie i bio-tolerancję soczewek.

Badania prowadzone nad poziomem pH oraz osmolalnością, zapewniły osiągnięcie pełnej biokompatybilności EYEEYE I●COMFORT z tkankami oczu i płynami organicznymi. Płyn produkowany jest w warunkach sterylnych.

#### System Waterlock skutecznie nawilża soczewki

Płyn wielofunkcyjny EYEEYE I●COMFORT, dzięki właściwościom wiązania wody (System Waterlock), nawilża soczewki nie tylko bezpośrednio po jego zastosowaniu, ale także przez cały dzień podczas ich noszenia. Zwiększa również komfort, zmniejszając suchość oczu i poziom podrażnień.

#### Silna formuła czyszcząca zapewnia wyjątkowy komfort

EYEEYE I●COMFORT jest innowacyjnym płynem wielofunkcyjnym, łączącym bezpieczeństwo oraz komfort dzięki systemowi podwójnej dezynfekcji oraz zastosowaniu wysokiej jakości Hialuronianu.

#### Delikatność dzięki zastosowaniu Hialuronianu

Naturalna substancja nawilżająca, jaką jest biopolimer Hialuronian, zapobiega wysychaniu powierzchni oczu oraz soczewek,

---

powodując zwiększenie komfortu ich noszenia.

EYEYE I●COMFORT zawiera wysokiej jakości Hialuronian wytwarzany w ekologicznym procesie opartym na wodzie. W związku z tym nie zawiera żadnych substancji toksycznych lub odzwierzęcych i dzięki temu działa bezpiecznie oraz skutecznie.

#### **Długotrwałe działanie antybakteryjne**

Preparat EYEYE I●COMFORT zapewnia optymalny komfort noszenia soczewek. Ma również bardzo silne właściwości dezynfekujące, uzyskiwane dzięki efektowi synergii dwóch substancji dezynfekujących: PHMB i Poliquaternianu.

Płyn wielofunkcyjny EYEYE I●COMFORT plasuje się znacznie powyżej wymagań, które opisuje Norma 1 ISO 14279, co pozwala na naprawdę bezpieczne noszenie soczewek kontaktowych.

## Porady

EYEYE I●COMFORT

NOWO??!

## Ważne użycie EYEYE I●COMFORT jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek.

Preparat **EYEYE I●COMFORT** to nowy, wielofunkcyjny płyn, zawierający biopolimer Hialuronian, o wyjątkowych właściwościach wiskoelastycznych.

Płyn **EYEYE I●COMFORT** poprawia nawilżanie oraz bio-tolerancję soczewek. Preparat przeznaczony jest do czyszczenia, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, płukania, przechowywania, nakładania oraz nawilżania soczewek kontaktowych.



EYEYE I●COMFORT - Najnowszy płyn, który ochroni Twoje oczy i soczewki kontaktowe

## Czynniki niezbędne do właściwej, codziennej pielęgnacji Twoich soczewek z wykorzystaniem płynu EYEYE I●COMFORT:

- 1. Higiena:** Przed zdejmowaniem soczewek lub wyjmowaniem ich z pojemnika należy starannie umyć ręce. Osusz ręce czystym

ręcznikiem. Możesz zastosować specjalny preparat dezynfekujący dłonie **EYEYE Sanilon**.


**2. Czyszczenie:** W przypadku wystąpienia dużych osadów białka i zanieczyszczeń umieść soczewki na dłoni. Następnie wpuść kilka kropli **EYEYE I●COMFORT** na soczewki kontaktowe. Delikatnie pocieraj je palcem.

**3. Płukanie:** Przed dezynfekcją opłucz starannie soczewki kontaktowe płynem **EYEYE I●COMFORT**, po czym umieść je w pojemniku na soczewki.

**4. Dezynfekcja i przechowywanie:** Wypełnij pojemnik płynem **EYEYE I●COMFORT**. Pozostaw soczewki kontaktowe w pojemniku na co najmniej 4 godziny.

**5. Zakładanie:** Wyjmij soczewki kontaktowe z pojemnika po zakończeniu cyklu ich dezynfekcji, opłucz je roztworem **EYEYE I●COMFORT** i załóż soczewki do oczu. Opłucz pojemnik na soczewki płynem lub solą fizjologiczną **EYEYE Saline**, pozostaw pojemnik do wyschnięcia na powietrzu.

**6. Nawilżanie:** Jeśli odczuwasz niewielkie podrażnienia podczas noszenia soczewek kontaktowych, zapuść do oka kroplę **EYEYE I●COMFORT** i kilkakrotnie zamrugaj. Możesz przy tym pozostawić soczewkę w oku. Jeśli podrażnienia nie ustąpią, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

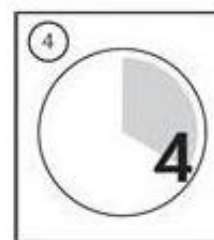

## EYEYE I●COMFORT all in one – Nowoczesna ochrona Twoich oczu i soczewek kontaktowych

Przy użyciu płynu **EYEYE I●COMFORT** soczewki kontaktowe poddane są czyszczeniu oraz dezynfekcji podczas jednego procesu. System HydraFlex™ zawiera kombinację różnych składników, powodujących usuwanie z soczewek osadów białka. Zapewnia Twoim oczom głęboko kojące odczucie.

---

Unikalne połączenie 3 naturalnie wytwarzanych przez organizm składników płynu **EYEYE I●COMFORT** zapewnia najwyższy komfort noszenia soczewek:

- **Prowitamina B5** chroni, odżywia i wspomaga samoregenerację rogówki.
- **Karnozyna** jest najskuteczniejszym przeciwutleniaczem, który pomaga eliminować wolne rodniki, mogące niszczyć komórki rogówki, a nawet niweluje wczesne uszkodzenia.
- **Hialuronian** ochrania powłokę łzową i powoduje optymalne nawilżenie soczewek.

**EYEYE I●COMFORT** służy do przechowywania, czyszczenia, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, płukania, nawilżania. Ułatwia zakładanie soczewek oraz pielęgnuje oko... Wszystko w jednym!

## EYEYE I●COMFORT – Zalecenia:

- Należy zużyć zawartość **EYEYE I●COMFORT** w ciągu 2 miesięcy od jej otwarcia.
- Nie używać **EYEYE I●COMFORT** po upływie terminu przydatności.
- Przechowywać **EYEYE I●COMFORT** w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C.
- Należy zamykać butelkę **EYEYE I●COMFORT** bezpośrednio po użyciu.
- W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli zalecono Ci lek do oczu, przed użyciem leku w połączeniu z soczewkami kontaktowymi, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

Wskazówki przydatne odnośnie właściwego użycia soczewek oraz pojemnika na soczewki:

- Zaleca się używanie nowego pojemnika na soczewki kontaktowe po 3

---

miesiącach, aby był on czysty i wolny od bakterii.

- Zawsze natychmiast usuwaj zużyty roztwór. Następnie opłucz pojemnik roztworem **EYEYE I●COMFORT**, aby go zdezynfekować. Pozwól mu wyschnąć na powietrzu. NIE osuszaj pojemnika ściereczką.
- Unikaj używania wody z kranu do soczewek oraz do pojemnika. Niektóre typy soczewek mogą ulec deformacji w kontakcie z wodą.
- Jeśli soczewki pozostają w roztworze płynu **EYEYE I●COMFORT** dłużej niż kilka dni, zaleca się ponowne zdezynfekowanie soczewek.

## Skutki uboczne

Nie używać **EYEYE I●COMFORT** przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu!

## Dodatkowe informacje

EYEYE I-COMFORT

Nowy wielofunkcyjny preparat z Hialuronianem

do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych

- Podwójny system dezynfekcyjny, oparty na PHMB oraz Poliquaternianie.
- Wyjątkowy komfort dzięki wysokiej jakości Hialuronianowi.
- Skuteczne usuwanie osadów białek oraz lipidów.
- Nie zawiera żadnych substancji toksycznych ani odzwierzęcych.
- Preparat o neutralnym pH.

- Doskonały do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych.
- Zalecany do soczewek kontaktowych silikonowo-hydrożelowych.



**SKŁAD:** Polyquaternium, Hyaluronate, PHMB 0,0001%.

**OPAKOWANIE:** 360 ml, z pojemnikiem na soczewki.

EYEYE I●COMFORT all in

---

# NOWOŚĆ!

## one

Wielofunkcyjny płyn klasy Premium z Hialuronianem do miękkich soczewek kontaktowych

**EYEYE I●COMFORT to płyn wielofunkcyjny z Hialuronianem do czyszczenia, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, płukania, przechowywania, nakładania i nawilżania miękkich soczewek kontaktowych.**

---

# NOWY WIELOFUNKCYJNY PŁYN Z HIALURONIANEM SODU, ZALECANY DO OCZU WRAŻLIWYCH

Zawiera Hialuronian sodu, biopolimer o wyjątkowych właściwościach wiskoelastycznych (będących połączeniem lepkości i elastyczności), poprawia nawilżanie oraz bio-tolerancję soczewek.

Badania prowadzone nad poziomem pH oraz osmolalnością, zapewniły osiągnięcie pełnej biokompatybilności preparatu **EYEYE I●COMFORT** z tkankami oczu i płynami organicznymi. Płyn produkowany jest w warunkach sterylnych.

## System Waterlock skutecznie nawilża soczewki

Płyn wielofunkcyjny **EYEYE I●COMFORT**, dzięki właściwościom wiązania wody (*System Waterlock*), nawilża soczewki nie tylko bezpośrednio po jego zastosowaniu, ale także przez cały dzień podczas ich noszenia. Zwiększa również komfort, zmniejszając suchość oczu oraz poziom podrażnień.

## Silna formuła czyszcząca zapewnia wyjątkowy komfort

**EYEYE I●COMFORT** jest innowacyjnym płynem wielofunkcyjnym, łączącym bezpieczeństwo oraz komfort dzięki systemowi podwójnej dezynfekcji oraz zastosowaniu wysokiej jakości Hialuronianu.

## Delikatność dzięki zastosowaniu Hialuronianu

Naturalna substancja nawilżająca, jaką jest biopolimer Hialuronian, zapobiega wysychaniu powierzchni oczu oraz soczewek, powodując zwiększenie komfortu ich noszenia.



---

**EYEYE I●COMFORT** zawiera wysokiej jakości Hialuronian wytwarzany w ekologicznym procesie opartym na wodzie. W związku z tym nie zawiera żadnych substancji toksycznych lub odzwierzęcych i dzięki temu działa bezpiecznie oraz skutecznie.

## **Długotrwałe działanie antybakteryjne**

Preparat **EYEYE I●COMFORT** zapewnia optymalny komfort noszenia soczewek. Ma również bardzo silne właściwości dezynfekujące, uzyskiwane dzięki efektowi synergii dwóch substancji dezynfekujących: PHMB i Poliquaternianu.

Płyn wielofunkcyjny **EYEYE I●COMFORT** plasuje się znacznie powyżej wymagań, które opisuje Norma 1 ISO 14279, co pozwala na naprawdę bezpieczne noszenie soczewek kontaktowych.

## **W jaki sposób EYEYE I●COMFORT ochrania oczy?**

**EYEYE I●COMFORT to płyn nowej generacji, nie zawiera żadnych substancji toksycznych ani odzwierzęcych, posiada neutralne pH, dlatego polecany jest także dla alergików.**

### **Podwójna ochrona antybakteryjna**

Bakterie mogą pojawić się na soczewkach w wyniku kontaktu z rękoma lub pojemnikiem do przechowywania soczewek albo dotknięcia końcówką zakraplającą do innej powierzchni.



**ANTI BACTERIAL**

Podwójny system dezynfekcyjny **EYEYE I●COMFORT**, oparty na PHMB oraz Poliquaternianie, efektywnie ochroni oczy przed bakteriami, zmniejszając ich obecność do nieszkodliwego poziomu.



**COMFORT**

### **Naturalne nawilżanie dzięki Hialuronianowi**

Zawarty płyn **EYEYE I●COMFORT** biopolimer nawilżający, o wyjątkowych właściwościach wiskoelastycznych (lepki i elastyczny). Staje się cieńszy przy zamykaniu powiek oczu, a rozszerza się pomiędzy mrugnięciami, poprawia nawilżanie oraz bio-tolerancję soczewek.

Pełni funkcję naturalnego „smaru” w ludzkim ciele. Jego zdolność wiązania wody tysiąckrotnie przewyższa jego masę. Chroni błonę powłoki łzowej, ogranicza parowanie, mogące powodować wysuszenie soczewek i oczu. Zwiększa zdolność wytwarzania łez, doskonale chroni soczewki przed wyschnięciem, zapewnia większy komfort ich użytkowania.



**BIO-SAFE**

### **Bezpieczny dla oczu i środowiska**

Płyn **EYEYE I●COMFORT** produkowany w opartym na wodzie ekologicznym procesie, w warunkach sterylnych. Nie zawiera żadnych substancji toksycznych ani pochodzenia zwierzęcego.

Składniki płynu zostały starannie dobrane tak, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych oraz podrażnień. Płyn jest bezpieczny pod względem fizjologicznym.

---

# Preparat EYEYE

## I●COMFORT Pozostałe cechy:



SiH APPROVED

### Doskonały do soczewek silikonowo-hydrożelowych

Unikalne składniki płynu EYEYE I●COMFORT powodują, że nadaje się on znakomicie do pielęgnacji miękkich soczewek kontaktowych, także silikonowo-hydrożelowych oraz soczewek biokompatybilnych.

Preparat EYEYE I●COMFORT przeznaczony jest do czyszczenia, usuwania osadów białkowych, dezynfekcji, płukania, przechowywania, nakładania oraz nawilżania miękkich soczewek kontaktowych.



pH-NEUTRAL

### Neutralny poziom pH

Specjalne badania laboratoryjne, prowadzone nad poziomem pH oraz osmolalnością, zapewniły osiągnięcie pełnej biokompatybilności płynu **EYEYE I●COMFORT** z tkankami oczu oraz płynami organicznymi.

Płyn służy do czyszczenia oraz dezynfekcji wszystkich typów miękkich soczewek kontaktowych.

### Eliminuje białka i lipidy

Zadaniem płynu **EYEYE I●COMFORT** jest maksymalne ograniczenie rozwoju bakterii oraz zminimalizowanie możliwości uszkodzenia powierzchni oczu.



REMOVES LIPID

Płyn skutecznie usuwa osady białkowe i lipidowe. Soczewki pozostają czyste oraz dokładnie zdezynfekowane.

