

Link do produktu: <https://www.e-soczewki24.pl/eyeye-monosept-360ml-plyn-do-czyszczenia-soczewek-dla-alergikow-p-11.html>



EYEE MonoSept 360ml płyn do czyszczenia soczewek dla alergików

Cena **42,99 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Producent **BARNAUX**

Opis produktu

EYEE MonoSept 360ml

Najskuteczniejszy system czyszczenia soczewek firmy BARNAUX.

Idealny dla alergików - bez użycia konserwantów.
Po dezynfekcji płyn neutralizuje się do roztworu soli izotonicznej.
Polecany do czyszczenia soczewek miękkich i twardych.
Niezastąpiony system pielęgnacji soczewek długiego noszenia (trzymiesięczne, roczne).

Skład: Nadtlenek wodoru 3%,
platynowa płytka neutralizująca nadtlenek wodoru.

Zawartość opakowania: butelka płynu 360ml ,
pojemnik EYEE MonoSept z dyskiem platynowym.

Data ważności : min. 2023-07.

System EYEE MonoSept z dyskiem platynowym to klasyczny system pielęgnacyjny, polecany do doskonałej dezynfekcji wszystkich soczewek, zarówno miękkich, jak i twardych. Dzięki dysкови MonoSept powleczonemu platyną, nadtlenek wodoru jest neutralizowany i zmienia się w niezawierający konserwantów roztwór soli fizjologicznej.

Łatwy w użyciu:

- wygodny, jednobutelkowy system,
- dezynfekcja i neutralizacja przebiega jednoetapowo,
- neutralizacja w ciągu 6 godzin.

Efektywny i skuteczny:

- spełnia wymagania ISO i FDA,
- skutecznie zwalcza wszystkie szkodliwe dla oczu bakterie oraz grzybice.

Bezpieczeństwo przede wszystkim:

- platynowy dysk zmienia nadtlenek wodoru w roztwór soli fizjologicznej,
- nie zawiera środków konserwujących i dlatego NIE podrażnia, ani nie uszkadza oczu,
- przeznaczony dla wszystkich osób noszących soczewki kontaktowe,

Płyn NIE służy do płukania ani nawilżania soczewek kontaktowych!

Stosować zgodnie z załączoną instrukcją.

Porady

EYEYE MonoSept

Właściwe użycie systemu EYEYE MonoSept jest istotne zarówno dla Twoich oczu, jak i soczewek.

Posługując się **EYEYE MonoSept** pielęgnujesz soczewki prosto oraz bezpiecznie. System MonoSept skutecznie dezynfekuje soczewki kontaktowe.

Proces pielęgnacji soczewek kontaktowych odbywa się bez wykorzystania konserwantów. W pojemniczku został umieszczony specjalny platynowy dysk, który neutralizuje płyn EYEYE MonoSept.

Po zakończeniu pełnego cyklu neutralizacji soczewki kontaktowe można ponownie założyć. System EYEYE MonoSept można uzupełnić o zastosowanie tabletek usuwających białko, takich jak tabletki EYEYE 3-N-Zym.



Uwagi odnośnie systemu EYEYE MonoSept:

- Zawsze używaj TYLKO składników systemu EYEYE MonoSept. NIE używaj składników innych systemów do pielęgnacji soczewek za wyjątkiem soli fizjologicznej przeznaczonej do opłukiwania soczewek oraz pojemnika lub kropli do nawilżania EYEYE Hydraclair.
- Upewnij się, że nie zakładasz soczewek, które nie zostały w pełni zdezynfekowane. Nie zneutralizowany do końca płyn EYEYE MonoSept może powodować pieczenie i silne odczucia podrażnienia oczu.
- Zneutralizowany płyn w pojemniczku NIE ma właściwości konserwujących. Jeśli soczewki kontaktowe pozostają w płynie EYEYE MonoSept dłużej niż 24 godziny, zaleca się ich ponowne zdezynfekowanie.
- Należy unikać dotykania palcami platynowej płytki. Palce zostawiają ślady

tłuszczu, obniżając skuteczność neutralizacyjną płytki.

- Wraz z otwarciem nowej butelki z płynem EYEYE MonoSept należy zawsze użyć nowy pojemnik na soczewki EYEYE MonoSept z platynowym dyskiem neutralizującym.
- Jeśli płyn EYEYE MonoSept zostanie przypadkowo połknięty, należy natychmiast wypić dużą ilość wody oraz skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku przeciągających się podrażnień oczu skontaktuj się z lekarzem lub optometrystą.

EYEYE MonoSept - Unikalny system, który oczyszcza Twoje soczewki kontaktowe

Wskazówki prawidłowego używania systemu EYEYE MonoSept



do dezynfekcji Twoich soczewek kontaktowych:

1. Higiena: Przed zdejmowaniem soczewek lub wyjmowaniem ich z pojemnika należy starannie umyć ręce. Osusz ręce czystym ręcznikiem. Możesz zastosować specjalny preparat dezynfekujący dłonie **EYEYE Sanilon**.

2. Umieszczanie soczewek w koszykach pojemnika: Włóż lewą soczewkę do sferycznego koszyczka oznaczonego literą L, następnie go zamknij. Włóż prawą soczewkę do prawego sferycznego koszyczka pojemnika, następnie go zamknij.

3. Napętnianie pojemnika: Wypełnij specjalny pojemniczek na soczewki płynem EYEYE MonoSept do zaznaczonego poziomu. UWAGA: płynu nie może być ani za mało, ani za dużo. W przypadku gdy płynu jest za dużo może się on spenić; gdy płynu jest za mało istnieje ryzyko skażenia soczewek. Należy zawsze używać świeżego płynu do każdorazowej dezynfekcji.

4. Umieszczanie koszyczka w pojemniku: Umieść koszyczek w pojemniczku, po czym zakręć go. Nie potrząsaj pojemniczkiem, ponieważ może to spowodować przyklejenie się cząsteczek nadtlenku wodoru do wewnętrznej części pojemniczka. Podczas zakładania soczewek kontaktowych cząsteczki te mogą

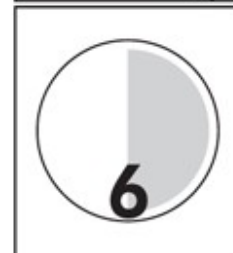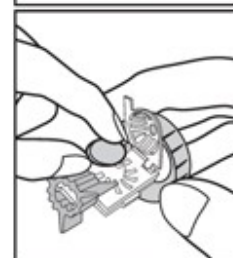

spowodować silne pieczenie oczu. Należy wtedy natychmiast opłukać oczy dużą ilością czystej wody.

- 5. Dezynfekcja i przechowywanie:** Pozostaw soczewki kontaktowe w preparacie **EYEYE MonoSept** na okres co najmniej sześciu godzin, a najlepiej na całą noc.
- 6. Zakładanie:** Wyjmij soczewki kontaktowe z pojemniczka. Przed założeniem opłucz je roztworem soli fizjologicznej **EYEYE Saline**. Możesz je teraz założyć i nosić.
- 7. S płukiwanie i suszenie pojemniczka:** Zawsze należy natychmiast wylewać zużyty płyn **EYEYE MonoSept**. Następnie dokładnie opłukać koszyczek, pojemniczek oraz platynową płytkę solą fizjologiczną **EYEYE Saline** lub płynem **EYEYE MonoSept**. **NIGDY** nie należy używać w tym celu wody! Opłukanie płytki jest niezbędne do usunięcia pozostałych zanieczyszczeń, które mogą zakłócić neutralizację płynu **EYEYE MonoSept**. Pozostaw pojemnik na powietrzu do wyschnięcia. **NIE** osuszaj go ściereczką.

EYEYE MonoSept – Zalecenia

- Należy zużyć zawartość butelki **EYEYE MonoSept** w ciągu 3 miesięcy od jej otwarcia.
- Nie używać preparatu **EYEYE MonoSept** po upływie terminu przydatności.
- Przechowywać butelkę **EYEYE MonoSept** w temperaturze pomiędzy 5°C a 25°C.
- Należy zamykać butelkę **EYEYE MonoSept** bezpośrednio po użyciu.
- W celu uniknięcia skażenia nie dotykać czubka butelki.
- Trzymać preparat **EYEYE MonoSept** poza zasięgiem dzieci.
- Niektóre typy soczewek mogą ulec deformacji w kontakcie z wodą.
- Jeśli zalecono ci lek do oczu, przed użyciem leku w połączeniu z soczewkami kontaktowymi oraz preparatem **EYEYE MonoSept**, skonsultuj się z okulistą lub optometrystą.

Skutki uboczne

Nie używać **EYEYE MonoSept** przy uczuleniu na którykolwiek ze składników płynu!

Dodatkowe informacje

[EYEYE MonoSept](#)

Najskuteczniejszy system czyszczenia soczewek

- Idealny dla alergików – bez użycia konserwantów.
- Po dezynfekcji płyn neutralizuje się do roztworu soli izotonicznej.
- Polecany do czyszczenia soczewek miękkich i twardych.
- Niezastąpiony system pielęgnacji soczewek długiego noszenia (trzymiesięczne, roczne).



SKŁAD: Nadtlenek wodoru 3%, platynowa płytką neutralizująca nadtlenuk wodoru.

OPAKOWANIA: 90 ml, 360ml, z pojemnikiem EYEYE MonoSept z dyskiem platynowym.

System EYEYE MonoSept z dyskiem platynowym

Zestaw **EYEYE MonoSept** to klasyczny system pielęgnacyjny, polecany do doskonałej dezynfekcji wszystkich rodzajów soczewek, zarówno miękkich, jak i

twardych. Dzięki dyskiowi MonoSept powleczonemu platyną, nadtlenek wodoru jest neutralizowany, po czym zmienia się w niezawierający konserwantów roztwór soli fizjologicznej.

Łatwy w użyciu

- Wygodny, jednobutelkowy system.
- Dezynfekcja i neutralizacja przebiega jednoetapowo.
- Neutralizacja następuje w ciągu 6 godzin.

EYEE MonoSept - Efektywny i skuteczny

- Spełnia wymagania stawiane przez ISO i FDA.
- Skutecznie zwalcza wszystkie szkodliwe dla oczu bakterie oraz grzybice.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

- Platynowy dysk znajdujący się w pojemniku na soczewki kontaktowe zmienia nadtlenek wodoru w roztwór soli fizjologicznej.
- Preparat **EYEE MonoSept** nie zawiera środków konserwujących. Dlatego też **NIE** podrażnia, ani nie uszkadza oczu.
- Przeznaczony jest dla wszystkich osób noszących soczewki kontaktowe.
- **EYEE MonoSept** **NIE** służy do płukania ani nawilżania soczewek kontaktowych!



