

Link do produktu: <https://www.e-soczewki24.pl/eyeye-sil-lens-150-silicon-hydrogel-3-soczewki-miesieczne-6szt-p-78.html>



EYEE SIL LENS 150 Silicon Hydrogel 3 soczewki miesięczne 6szt

Cena	81,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	BARNAUX

Opis produktu

EYEE SIL LENS 150 Silicon Hydrogel 3

Miesięczne soczewki kontaktowe firmy BARNAUX do dziennego noszenia

Soczewki wykonane z materiału silikonowo-hydrożelowego 3 generacji.

Specjalnie skonstruowana wielokątowa krawędź minimalizuje punkty nacisku soczewki na oko zapewniając dobry przepływ filmu łzowego.

Asferyczny kształt soczewki eliminuje zniekształcenia obrazu.

PARAMETRY	Uwodnienie:	47%	Zakres mocy:	od - 0.25 do - 6.00 (co 0.25 D)
	Materiał:	Filcon 1		od - 6.50 do -10.00 (co 0.50 D)
	Grubość:	0,08mm (-3.00 D)		od + 0.50 do + 6.00 (co 0.25 D)
	BC:	8.7 (asferyczna)		od + 6.50 do + 8.00 (co 0.50 D)
	Dia:	14.0	Opakowanie:	6szt tej samej mocy
	Dk/t:	187	Data ważności:	min. 6 m-cy od daty zakupu.
	Dk:	150		

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc soczewek:: -0.25 D , -0.50 D , -0.75 D , -1.00 D , -1.25 D , -1.50 D , -1.75 D , -2.00 D , -2.25 D , -2.50 D , -2.75 D , -3.00 D , -3.25 D , -3.50 D , -3.75 D , -4.00 D , -4.25 D , -4.50 D , -4.75 D , -5.00 D , -5.25 D , -5.50 D , -5.75 D , -6.00 D , -6.50 D , -7.00 D , -7.50 D , -8.00 D , -8.50 D , -9.00 D , -9.50 D , -10.00 D , +0.50 D , +0.75 D , +1.00 D , +1.25 D , +1.50 D , +1.75 D , +2.00 D , +2.25 D , +2.50 D , +2.75 D , +3.00 D , +3.25 D , +3.50 D , +3.75 D , +4.00 D , +4.25 D , +4.50 D , +4.75 D , +5.00 D , +5.25 D , +5.50 D , +5.75 D , +6.00 D , +6.50 D , +7.00 D , +7.50 D , +8.00 D

Zakładanie soczewek

W celu założenia soczewek miesięcznych wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je.
- Zerwij folię z opakowania i delikatnie wyjmij soczewkę SIL LENS 150. Przed kolejnym założeniem soczewki spłucz ją płynem lub solą fizjologiczną w celu usunięcia osadów.
- Umieść soczewkę SIL LENS 150 na opuszku palca wskazującego i upewnij się, czy soczewka nie wywinęła się na drugą stronę i czy nie jest uszkodzona.
- Środkowym palcem ręki trzymającej soczewkę odciągnij dolną powiekę, a środkowym lub wskazującym palcem drugiej ręki przytrzymaj górną powiekę.
- Delikatnie umieść soczewkę SIL LENS 150 na oku i powoli puść powieki. Mrugnij kilka razy.
- Powtórz te czynności, zakładając drugą soczewkę.

W celu zdjęcia soczewek miesięcznych wykonaj następujące czynności:

- Dokładnie umyj ręce i osusz je.
- Jeśli odczuwasz suchość oczu, użyj kropeł EYEE Hydraclair przed

ściągnięciem soczewek SIL LENS 150.

- Przytrzymaj dolną powiekę, spójrz w górę a palcem wskazującym drugiej ręki zsuń soczewkę.
- Ostrożnie chwyć (uszczypnij) soczewkę SIL LENS 150 przy pomocy kciuka oraz palca wskazującego, a następnie ją wyjmij.
- W taki sam sposób postępuj z drugą soczewką SIL LENS 150.
- Soczewki miesięczne SIL LENS 150 umieść w pojemniku. Prawą do części oznaczonej literą „R”, a lewą do części nieoznaczonej lub oznaczonej literą „L”. Soczewki zalej płynem do ich pielęgnacji, aby przeprowadzić proces ich czyszczenia.